

# 豪华双摇病床 VIP病房护理床 医用病床

产品名称	豪华双摇病床 VIP病房护理床 医用病床
公司名称	浙江曙光医疗器械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙江曙光医疗 型号:曙光BC-B205A
公司地址	浙江海宁市长安镇（农发区）新兴路29号
联系电话	15824328565

## 产品详情

豪华双摇病床 vip病房护理床 医用病床

该款双摇病床参数说明：

- 规格：2180\*960\*500mm
- 床板位置调节  
背板：0~75°  
腿板：0~45°
- 最大承重：250 kg
- 高档中控静音轮
- 输液架（选配）
- 引流挂钩
- 床垫(选配)
- 可拆卸abs床头床尾板
- 高档不锈钢对折折叠式护栏
- 表层静电粉末喷涂

优质冷轧钢管床架

优质冷轧钢板床面

• 拉伸餐桌（选配）

病床/护理床主要由床面板、床架、床头尾板、护栏以及传动系统等组成；病床/护理床床面材料为高强度工程塑料板、高档实木板或钢板；床架和床脚采用冷轧钢板、钢管，或不锈钢制造，并经过静电粉末喷涂，美观耐用。病床/护理床采用手摇把转动丝杆传动实现病床姿态的调整，安全可靠；病床/护理床床头尾板洁净美观、装卸自如、清洁方便，带有锁紧装置，可确保与床身连接紧固；该病床/护理床供医疗单位对患者作护理、疗养、检查等用。

手动病床/护理床功能介绍：1、背部升降功能

可在0°-75°范围内任意调节，辅助病人起身活动同时为护理人员减轻工作负担。2、腿部升降功能可在0°-45°范围内任意调节，辅助病人进行腿部活动。3、上下升降功能（三摇床功能）可在0-260mm范围内任意调节，根据病人自身情况调节上下高度方便病人上下床同时在出现紧急情况时方便医护人员对病人进行紧急救治。4、前后升降功能（定制功能）

可在0°-25°范围内任意调节，满足护理人员对特殊体位的要求。安装与使用方法【曙光bc-b205a】曙光豪华型双摇医用病床 多功能手动护理床 使用前应先检查其外观是否光滑、部件是否完整，各部件的安装、配合等是否有效。病床/护理床使用时应按病床的使用要求掌握适宜的力度。

1、病床/护理床床身与床架装配后，应固定牢靠，不得有松动、滑动的现象；2、将床头尾板的连接挂件挂于病床/护理床床身的连接销上，并用锁紧装置锁紧，使两者可靠连接；3、使用前应检查各紧固部件是否松动，如有松动应适当紧固；4、病床/护理床安装好后，应该踩下刹车；移动病床/护理床前应先放开刹车，防止损坏脚轮；5、操作转动手柄按顺时针升，逆时针降的原理进行，使病床/护理床床面、背框、脚框等上升或下降；手柄使用完后应折回隐藏位，以免碰伤。6、在调整病床/护理床床面角度时，应避免除病人以外的人坐在床上，以使床在合理的负载范围内工作。7、在选择和使用病床/护理床韩式护栏时，用手握住护栏的尾部，然后向床尾方向拉，护栏就会架起；按住锁扣，用手握住护栏的尾部，推向床头方向，护栏就会收下。注意事项与维护保养

1、病床/护理床病床在出厂前都经过严格测试，请勿自行拆卸、组合、分解。2、病床/护理床清洁可用柔软的、干净的布擦拭，也可用75%的异丙基酒精水溶液以获得更好的清洁效果。3、病床/护理床应贮存在干燥、无腐蚀性用柔软的、干净的布擦拭，也可用75%的异丙基酒精水溶液以获得更好的清洁效果。气体和通风良好的环境中，避免阳光直射。

4、病床/护理床的各部位应保持清洁。5、出现故障应由专业人员进行修理，需要本公司提供服务时，请及时与经销商或本公司售后服务部联系，切不可随意拆修。售后服务承诺

一、基本信息 曙光医疗依据用户购买病床/护理床时由曙光医疗提供的注明购买日期、产品型号的原始发票或现金收据给用户提供服务。保修的有效期限从您购买该产品开始算起，保修期限为一年。如果病床/护理床在保修期限内，因不良材料和/或工艺而产生的任何故障，由曙光医疗免费维修或更换病床/护理床。二、保修政策 1. 用户请妥善保存本保修卡及购买病床/护理床时曙光开具的国家税务局标准发票或其复印件。在维修时将被要求出示以上凭证作为保修依据。2. 病床/护理床的保修起始日期为发票购货日期。但如果发票购货日期晚于曙光发货日期加该类产品的宽限期，则以曙光发货日期加该类产品的宽限期作为病床/护理床的保修起始日期。3. 现场服务在某些地区无法提供。在被曙光公司排除的服务范围区域中，有地理障碍、道路未开发、或公共交通不适于常规旅行的区域，维修服务需要经过协商并通过附加收费来提供。