

# 胸腰椎矫形器 低位不带扇

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 胸腰椎矫形器 低位不带扇                         |
| 公司名称 | 安平县福众医疗器械贸易有限公司                      |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 建议零售价:¥ 100.00<br>产品类别:保健护腰<br>品牌:福众 |
| 公司地址 | 安平县东满正开发区                            |
| 联系电话 | 86-0318-7801826 13722801158          |

## 产品详情

安平县福众医疗器械有限公司专业生产护腰带、腹带、自发热护具、矫形器（康复支具）、医用牵引固定带、康复牵引架、医用外固定支具、体位垫、翻身垫、医用拐杖（助行器）、可塑夹板、驱血带、石膏袜套、石膏棉纸等康复耗材。福众医疗器械通过了国家食品药品监督管理局和河北省质量技术监督局生产批准，证件齐全，生产过程中严格把关，视质量为公司的生命，视信誉为公司的灵魂。矫形康复支具主要分为：头颈胸矫形器、胸腰椎矫形器（可调型）、胸腰椎矫形器（背带型）、肩外展矫形器、踝足矫形器、膝关节矫形器（冬用款）、膝关节矫形器（夏用款）、膝关节矫形器（厂家调节款）、膝关节矫形器（托板款）、髌关节矫形器、颈椎矫形器、脊柱过伸矫形器、肘关节矫形器。

【胸腰椎矫形器产品说明】：整体两片式结构，来矫正和稳定躯干，利用轻微的腹压来减轻脊椎的负荷，以提供脊椎有力的固定支撑稳定作用。【胸腰椎矫形器规格】：均码大小可以调节【胸腰椎矫形器产品适应症】：胸腰椎矫形器用于需要限制腰部运动的腰部疾患。有时用于治疗下腰痛和腰椎间盘突出、间盘突出术后和脊柱融合术后。也可用于治疗胸腰椎骨折（如：胸腰椎骨折、腰椎骶骨折损伤、椎体滑脱、椎间盘突出、椎体结核、骨质疏松、钢钉术后固定等）。【胸腰椎矫形器产品特点】：胸腰椎矫形器符合人体工程学设计的前后护片，提供腰椎的稳定及支撑效果，结构强度大，控制力度好。有效限制胸腰椎的屈曲、拉伸、侧屈和旋转。质轻美观，穿戴方便内衬垫可拆洗。侧边粘扣任意调节。【胸腰椎矫形器详情】：性能：采用国际先进的中硬度高分子合成材料。采用前后两片式的结构，为脊柱提供可靠的稳定支撑的作用。通过搭扣将前后胸压片有效连接，稳定胸椎上段。前后胸压片可随躯干在屈曲—伸展方向活动实现轻微移动。有效限制胸腰椎的屈曲、伸展、侧屈和旋转。【胸腰椎矫形器适应症】：脊柱（除颈椎外）急性损伤的制动保护胸腰椎椎体及其软组织术后固定胸腰椎骨折损伤的保守治疗胸腰椎椎体及其软组织损伤康复训练过程中早期站立。【胸腰椎矫形器规格型号】：均码【胸腰椎矫形器注意事项】 佩戴时先穿后半片，用内衬围腰固定；再用束扎带连接前片，调好松紧后固定；检查或调整好胸压垫与背压垫的高度；用配备的内六角扳手分别调整胸压垫与背压垫支杆上端的限位顶丝，使胸压垫和背压垫保持适当的活动范围；最后扎紧肩拉带。产品主体和上胸部一起固定，更有效的防止患者左右旋转.弯腰。其前后两片的上部可根据

其体形来改变使其更服帖，可最大限度的分散脊椎压力.固定性更好支撑力度更大。对脊椎侧弯有很好的约束治疗效果。使用须知：矫形器的佩戴使用须遵医嘱。

安平县福众医疗器械有限公司专业生产护腰带、腹带、自发热护具、矫形器（康复支具）、医用牵引固定带、康复牵引架、医用外固定支具、体位垫、翻身垫、医用拐杖（助行器）、可塑夹板、驱血带、石膏袜套、石膏棉纸等康复耗材。福众医疗器械通过了国家食品药品监督管理局和河北省质量技术监督局生产批准，证件齐全，生产过程中严格把关，视质量为公司的生命，视信誉为公司的灵魂。矫形康复支具主要分为：头颈胸矫形器、胸腰椎矫形器（可调型）、胸腰椎矫形器（背带型）、肩外展矫形器、踝足矫形器、膝关节矫形器（冬用款）、膝关节矫形器（夏用款）、膝关节矫形器（厂家调节款）、膝关节矫形器（托板款）、髌关节矫形器、颈椎矫形器、脊柱过伸矫形器、肘关节矫形器。

【胸腰椎矫形器产品说明】：整体两片式结构，来矫正和稳定躯干，利用轻微的腹压来减轻脊椎的负荷，以提供脊椎有力的固定支撑稳定作用。【胸腰椎矫形器规格】：均码  
大小可以调节【胸腰椎矫形器产品适应症】：胸腰椎矫形器用于需要限制腰部运动的腰部疾患。有时用于治疗下腰痛和腰椎间盘突出、间盘突出术后和脊柱融合术后。也可用于治疗胸腰椎骨折（如：胸腰椎骨折、腰椎骶骨折损伤、椎体滑脱、椎间盘突出、椎体结核、骨质疏松、钢钉术后固定等）。【胸腰椎矫形器产品特点】：胸腰椎矫形器符合人体工程学设计的前后护片，提供腰椎的稳定及支撑效果，结构强度大，控制力度好。有效限制胸腰椎的屈曲、拉伸、侧屈和旋转.质轻美观，穿戴方便内衬垫可拆洗。侧边粘扣任意调节。【胸腰椎矫形器详情】:性能：采用国际先进的中硬度高分子合成材料。采用前后两片式的结构，为脊柱提供可靠的稳定支撑的作用。通过搭扣将前后胸压片有效连接，稳定胸椎上段。前后胸压片可随躯干在屈曲—伸展方向活动实现轻微移动。有效限制胸腰椎的屈曲、伸展、侧屈和旋转。【胸腰椎矫形器适应症】：脊柱（除颈椎外）急性损伤的制动保护胸腰椎椎体及其软组织术后固定胸腰椎骨折损伤的保守治疗胸腰椎椎体及其软组织损伤康复训练过程中早期站立。【胸腰椎矫形器规格型号】:均码【胸腰椎矫形器注意事项】 佩戴时先穿后半片，用内衬围腰固定；再用束扎带连接前片，调好松紧后固定；检查或调整好胸压垫与背压垫的高度；用配备的内六角扳手分别调整胸压垫与背压垫支杆上端的限位顶丝，使胸压垫和背压垫保持适当的活动范围；最后扎紧肩拉带。产品主体和上胸部一起固定，更有效的防止患者左右旋转.弯腰。其前后两片的上部可根据其体形来改变使其更服帖，可最大限度的分散脊椎压力.固定性更好支撑力度更大。对脊椎侧弯有很好的约束治疗效果。使用须知：矫形器的佩戴使用须遵医嘱。

本产品的建议零售价是¥100.00，产品类别是保健护腰，品牌是福众，材质是pvc，是否自发热是否，货号是胸腰椎矫形器-低位，规格是均码，箱装数量是10000，产地是河北衡水，加印LOGO是可以，加工定制是是