

升级版紫琳中药温灸保健腰带 红外线中药调理暖宫护理 电热腰带

产品名称	升级版紫琳中药温灸保健腰带 红外线中药调理暖宫护理 电热腰带
公司名称	广州市悦美佳贸易有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 150.00 产品类别:保健护腰 品牌:紫琳
公司地址	广州市越秀区广花二路瑶华中街249号地下
联系电话	13798192134

产品详情

每套内配送中药包一盒（一盒2片）

产品规格：额定电压 220v/50hz

额定功率约：200w

执行标准：gb4706.10-93

规格说明：长*宽=120*24厘米（参考数值）

可依个人适用温度调温。(弱:49 左右;中:58 左右;强: 68 左右)

温

关爱女人----从卵巢保养开始

使用说明：

1. 请先将温灸腰带完全摊平，插上电源，然后再把开关转至强最高温，等温灸腰带预热后，再调整至个人的适用温度(中或弱).围在需要围的部位.即可使用，(不用时请把电源插头拔下).

2. 本公司温灸腰带可依个人不同需求有多种用途.(也可把其裹在膝.大腿.手臂.臀部.肩部等等部位)但不可扭曲折叠.
3. 每次使用温灸腰带的最佳时间是30分钟.
4. 艾草片可根据使用时间的长短来确定更换的时间.(如果按照一般使用时间每日30分钟,那么可持续使用一至二个月,但是可根据自我调整,也可每月更换).
5. 在更换艾草片的时候,先要拔掉电源,把温灸腰带完全摊平.然后再把内衬两边的拉练拉开,取出艾草片,放入新的艾草片,即可.

功效

1. 全方位增强卵巢功能,调节女性的激素分泌;
2. 调整生殖系统问题,改善痛经.月经不调.经前综合症.白带过多,阴道分泌过少等.
3. 改善女性特征,丰满结实胸部.修复妊娠纹.
4. 增加机体对刺激素的敏感性和应答水平.提高性趣.改善性生活质量.
5. 稳定内部机体环境,调理肌色肤色,改善黄褐斑和暗疮肌肤.
6. 推延更年期延缓衰老,增加女性肌体免疫力,预防妇女疾病.
7. 针对便秘横结肠内宿便,肠胃蠕动不佳.腹肠胀气.打嗝.消化系统病变及面部问题症状.一次见效.能快速改善皮肤晦暗.色斑及暗疮.清洗方法

在清洁的时候,可以以海绵沾水,轻轻擦拭内表,再以干布擦干了之后即可使用.(注意:请不要直接将本产品水洗)

本产品属红外线热暖保健产品,适合冬天取暖和因风寒风湿引起的关节炎、腰腿酸痛、胃寒不适、虚寒怕冷、肾虚腰疼、宫寒不孕以及腰、腹部肥胖者。能持续给您身体局部提供红外线脉冲热能,使身体长久保持热暖舒适,增强御寒抵抗能力。

艾温灸原理:古语云:七年之病求三年之艾为妙方。内有百草之王“艾草”药及其他活血中药,可稳定内部机体环境,调理肌色,改善黄褐斑和暗疮。推延更年期,增加机体免疫力,预防疾病。“热疗保健腰带”热暖护胃可使用在胃部、腰部和腹部。

温灸保健腰带适用范围:家庭必备,老少皆宜,强身健体。溶脂塑身,驱寒送暖,美满一生。单独控温,方便快捷,价格实惠,是白领一族和亚健康人群的首选。

使用方法:温控器控温+可调节控温将腰带围紧腰腹部或需要热敷的部位,然后将电源插头插入安全电源插座接通电源,按下触摸按钮开调节从小到大,可调值.(弱:49 左右;中:58 左右;强:68 左右)

注意事项: 1.不能在潮湿或接触到水的地方使用。 2.当外皮.防水pvc有划破时不可使用。 3.睡眠时不可使用。 4.不可折叠使用

本产品的建议零售价是 ¥ 150.00，产品类别是保健护腰，品牌是紫琳，材质是棉，是否自发热是否，货号是紫琳腰带，箱装数量是10，产地是广州，加印LOGO是可以，加工定制是否