

健康休闲消除疲劳保健攀高智能眼镜护眼仪

产品名称	健康休闲消除疲劳保健攀高智能眼镜护眼仪
公司名称	广州市檀橙贸易有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 680.00 产品类别:护眼罩 类型:磁疗/远红外眼罩
公司地址	广州市番禺区大石街猛涌石南路1号622
联系电话	13316136788 13822288677

产品详情

本店所有攀高系列产品京东有售，正品原厂出货。厂价直销批发，支持淘宝、天猫一件代发。攀高其它系列产品请咨询客服。

眼睛保健

一、眼睛保健——用眼卫生篇不用手揉眼睛，不用脏手帕或脏毛巾擦眼睛，不与他人共用毛巾、脸盆等洁具；患上眼睛疾病要及时到医院治疗，同时注意不要将病菌传染给他人。注意防止眼外伤，异物入眼要用正确的方法处理。

二、眼睛保健——饮食习惯篇不可偏食，应特别注意维生素b类(胚芽菜、麦片、酵母)食物的摄取，平时多摄入水果蔬菜，多食用维生素和多种营养素。

三、眼睛保健——按摩保健篇眼镜疲劳、干涩时，多进行眼部按摩和眼保健操等运动，促进眼部肌肉的放松，缓解视力疲劳。

四、眼睛保健——视力调节篇不在强烈的或太暗的光线下看书、写字；读写姿势要坐端正，眼与书之间要保持30厘米以上的距离；不躺着看书，乘车走路时不看书；读写时间不宜过长，每隔50分钟左右要放松休息一下，或是做做眼保健操，或是到窗前眺望远方；不要长时间观看电视节目、操作电脑和玩电子游戏。经常眺望远方放松眼肌，防止近视，与大自然多接触，青山绿野有益于眼睛的健康。

注意事项

- 1、有青光眼、白内障、视网膜脱离等眼疾症状时，请勿使用。
- 2、施行过眼部手术者请勿使用。
- 3、中风，高血压及低血压患者请勿使用本产品。
- 4、行动迟缓，身心功能不适或智能障碍者，请勿使用本产品。
- 5、使用本产品前请勿佩戴隐形眼镜。
- 6、请将按摩器戴在眼部再开机，以免气囊超压损坏。
- 7、请勿在驾驶时使用。
- 8、

请勿在高温、潮湿处使用9、使用本公司配置的dc6v稳压电源，并注意用电安全。使用外接电源适配器时，建议将电池从电池盒内取出。10、眼部按摩器设计为家用电子保健产品，不适用于诊断、治疗和其他商业用途。11、请用沾有中性清洁剂的消毒棉花擦拭。12、折叠主机时，请勿将其他物件放置到主机中间位置，以免机身受损，请勿将手指及身体其他部位放置主机中间位置，以免受伤。

本产品的建议零售价是¥680.00，产品类别是护眼罩，类型是磁疗/远红外眼罩，品牌是攀高，材质是PVC，型号是PG-2404G，动力模式是电动，功率是5（W），产地是深圳，加印LOGO是可以，加工定制是否