

眼镜配件 儿童眼罩 弱视眼罩 弱视训练 遮光眼罩 市场

产品名称	眼镜配件 儿童眼罩 弱视眼罩 弱视训练 遮光眼罩 市场
公司名称	丹阳市开发区小丁眼镜批发部
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 5.00 材质: 医用纤维布料 加印LOGO: 不可以
公司地址	丹阳国际眼镜城3F-D8018 (经营场所)
联系电话	86-051186260518 13812375368

产品详情

本产品特价一盒3元，内含6只。

本产品一盒6只，3只有卡通图案，三只无图案，分中小号，小孩子使用小号就够了。有特殊要求的朋友可以拍下时候备注下要大号默认拍下小号

尺寸：小号49mmx62mm（总长：50*80）盒子颜色随机

中号50mmx65mm（总长：50*96）盒子颜色随机

用遮盖法加强弱视训练，能够有效提高视力，适用于各种类型的弱视患者，新设计的眼罩内层夹黑色遮光材料，佩戴舒适。

原理：遮盖视力好的眼睛，强迫弱视眼看东西，同时使用弱视综合治疗仪及做精细目力家庭作业训练，刺激视觉神经系统发育，使弱视眼视力提高。

佩戴方法：取出眼罩，套在眼镜架一侧，遮盖单眼。

使用方法：

- 1、遮盖视力好的眼睛
- 2、强迫弱视眼看东西

- 3、同时做精细目力家庭作业（比如：穿珠子训练）
- 4、刺激视神经系统发育
- 5、使弱视眼视力提高
- 6、佩戴方法：取出眼罩
- 7、套在眼镜架一侧
- 8、遮盖单眼

注意事项：1、使用时应保持产品的清洁，卫生

2、弱视治疗期间，请遵医嘱定期到医院复查视力

眼罩不能水洗多次使用。用脏了需要更换新的。保持清洁避免感染眼睛。

因此孩子若不是短时间用。建议购买3盒以上（买几盒也只要一个邮费）。

本产品的建议零售价是¥5.00，材质是医用纤维布料，加印LOGO是不可以，品牌是好视洁，是否专利货源是否，型号是大中小，产品类别是护眼罩，动力模式是手动