

一次性使用止痛泵 24（月）

产品名称	一次性使用止痛泵 24（月）
公司名称	新乡市康林医疗器械有限公司长垣分公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:国食药监械准字2013第3540300号 有效期:24（月） 一次性使用:是
公司地址	长垣县丁栾工业区
联系电话	0373-8961636 13839069209

产品详情

现货批发 医用输注泵止痛泵

【持续型、自控型、电子泵 持续加自控型】

，，货源充足。

品牌 小护士 驼人牌 华星 华东 通达。。等

一、结构与性能

本产品由单向阀加药装置、弹力贮液装置、药液过滤器、限流装置（流量管）、自控给液装置（cbi没有）、管路和外圆锥接头组成。采用医用高分子材料制成，利用贮液囊的机械弹力微量给液，达到输注镇痛的目的。

二、适用范围

本产品用于手术后镇痛药物输注。

三、规格型号

cbi2ml/h、 cbi3ml/h、 cbi4ml/h、

cbi + pca2ml/h、 cbi + pca3ml/h、 cbi + pca4ml/h

四、使用方法

- 1、确认在有效期内和包装完好后打开包装，取出输注泵；
- 2、采用无菌注射器抽取配制好的药液，将注射器锥头插入单向阀加药装置，推动注射器芯杆缓慢注入药液；
- 3、打开开关，当药液从输注口流出（有自控装置时，应按压自控按键，排尽自控按键药液囊的空气），管路内无气泡时，即可使用；
- 4、带有自控给液装置的输注泵应在医护人员指导下使用，每按压一次自控按键，将追加0.5ml的药液剂量，每次自控给液间隔时间约为15分钟；
- 5、输注泵的悬挂位置与输注位置在20cm以上为宜。

六、注意事项：

- 1、本产品限一次性使用，用后销毁；
- 2、包装破损，严禁使用；
- 3、本产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期两年，过期产品严禁使用；
- 4、注入药液量不要超过标称容量；
- 5、流量值在 $\pm 15\%$ 范围内，均属正常；
- 6、使用中要注意观察，发现问题，应立即停止使用；
- 7、应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的室内。

产品由环氧乙烷灭菌

新乡市康林医疗器械有限公司，是一家主营医用医疗器械和一次性卫生用品的企业，位于河南省长垣县丁栾镇工业区，东临308省道，南临新荷铁路，大广高速、济东高速纵横毗邻，交通便利。本公司有雄厚的资质力量和周转往来资金，先进的技术水平，可靠的售后服务保障，严格的经营管理体系，完善的购、销服务档案制度。康林医疗器械愿与华夏大地生产经营医疗器械的有识之士谋发展，共创伟业。云集四海客，汇通八方商，公司全体员工并肩新老客户，以诚、信、德为服务宗旨，以精、优、特为经营理念，用一流的产品，一流的质量，一流的技术为客户保驾护航，为人类的身体健康做出积极贡献。康林医疗承诺：我们将以最优惠的价格，最优质的服务，最优秀的售后服务，竭诚让每一位新老顾客满意。

本产品的药（械）准字是国食药监械准字2013第3540300号，有效期是24（月），一次性使用是是