

# 会销会议礼品颈椎牵引器充气 颈椎牵引器家用 颈椎牵引器

产品名称	会销会议礼品颈椎牵引器充气 颈椎牵引器家用 颈椎牵引器
公司名称	衡水旺雨商贸有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 168.00 产品类别:保健护颈 品牌:123
公司地址	河北省衡水滨湖新区魏屯镇常宜子村
联系电话	15031841453

## 产品详情

**颈椎病的病理及牵引治疗的原理：**颈椎病是因颈椎间盘退变本身及其继发性的一系列病理改变，如局部组织肿胀淤血，颈椎间隙增生变窄，椎节失稳，松动，髓核突出或脱出，骨刺形成，韧带肥厚，椎管狭窄等，压迫或刺激了颈部神经根、脊髓、椎动脉及颈部交感神经等组织而引起的一组综合症。有效的牵引解除了血管神经等组织受压，从而缓解疼痛，反复牵引固定，使颈肌松弛，颈椎间隙加大，椎动脉拉直，促进血液循环，加快新陈代谢，减轻神经根受压，改善椎动脉及大脑供血情况，有利于局部淤血肿胀及增生消退，使颈椎病症状好转或完全消失

性能特点：便携式颈椎牵引器体积小，重量轻（250克）牵引力大（0-80公斤），牵引行程长（1-20厘米），乳胶内胆，绒布面料，透气性好，保护皮肤，充气成形时符合人体生理曲度，以保护颈前敏感区不受压，调节牵引作用和固定作用时，使用者仍感舒适。此产品使用安全、方便、见效快。适用范围：该产品适用于神经根型颈椎病，对长时间工作、学习、或驾车造成的颈部疼痛等症状有明显的治疗效果。长期使用本产品可起到颈部保健作用。

## 使用方法：

1、按正确方法戴好便携式颈椎牵引器，初用者可先照着镜子佩戴，

调节颈围大小，固定前部

上、中两个尼龙搭扣，以适合不同颈围的人使用（见图）。

- 2、充气球打气前请拧紧放气螺母。
- 3、用充气球打气直到患者感觉力度合适，症状减轻为止。
- 4、牵引固定治疗每天至少 2 - 3 次，每次至少30分钟左右。
- 5、使用后拧松放气螺母，缓慢放气。

使用注意：

- 1、充气前请将螺帽拧紧，特别注意使橡胶垫片压紧放气孔，勿将垫片向上倒置。充气后再将长管上的控制伐稍向上移，以防慢放气。
- 2、放气时将控制伐推回，并拧松充气手球螺帽。
- 3、长期不用时，不要把内胆中的气放净，并放阴凉处以便更好的保养乳胶内胆。
- 4、颈椎病患者应注意牵引治疗后，平时伏案工作半个小时后应起身休息活动一下，睡觉时枕头要合适。

注意事项：

- 1、治疗时尽量使颈部放松，慢慢加气压，以增强牵引效果。
- 2、充气时应循序渐进，不要过猛，在做牵引治疗出现头晕等异常反应时，应徐徐放气，直到不应有的症状消失，再重新调整使用。
- 3、大力牵引前应做30分钟小牵引，牵引复位时应在医生指导下进行。
- 4、使用时避免气囊接触坚硬物体，牵引器表面有污迹时，可在充气后用软毛刷粘水清洗，不可水泡、用力揉搓或刷洗。

本产品的建议零售价是¥168.00，产品类别是保健护颈，品牌是123，材质是68，是否自发热是否，货号是35，规格是36，箱装数量是100，产地是河北，加印LOGO是可以，加工定制是是