

# 眼部按摩器 眼保姆护眼仪 眼睛按摩仪按摩眼镜 眼护士眼保仪

产品名称	眼部按摩器 眼保姆护眼仪 眼睛按摩仪按摩眼镜 眼护士眼保仪
公司名称	上海家巧电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 198.00 产品类别:眼保健仪 品牌:眼护士
公司地址	上海市浦东新区大团镇东大公路2458号1幢5350室
联系电话	18217433090

## 产品详情

厂家直销 诚招加盟 价格面议 欢迎来电洽谈！联系人（王丹丹）：（手机：）13122807052,（固定电话：）02157810020，qq2928917164 随时在线，很高兴为您服务

产品功能：揉压穴位 多频振动

1.简易设计，配置可视镜面。整体设计纤薄简练，机身采用可视镜片，佩戴时丝毫不影响视线。2.防治近视，预防“电脑眼病”。3.促进眼微循环，快速放松减压。4.促进优质睡眠。

产品功效：

1、美容眼部,改善视力，预防近视，抑制近视加深

每天三次每次3-5分钟，有效改善眼组织的微循环，提高睫状肌的调节能力，激活眼部细胞组织，增氧通络，有效改善视力，美容眼部、明目凝神。

2、彻底释放眼部疲劳，快速消除眼干、眼胀、电脑眼病；

抑制神经衰弱及失眠，消除眼疲劳每次闭目戴用3-5分钟，可使眼球与眼肌充分放松，降低眼内压，迅速消除用眼过度引起的酸胀、肿痛、干涩、怕光及视物模糊等症状，易于进入深度睡眠，消除用脑过度及神经衰弱引起的失眠症，并可缩短入睡时间。

3、大脑快速放松，恢复自然轻松活力,减少皱纹增强皮肤弹性

每天坚持使用5-10分钟，即可帮助消除由于睡眠不足和血液循环不畅形成的眼袋及黑眼圈，加强眼部细胞的新陈代谢，抚平眼角皱纹，使眼角的肌肤更加光泽和富有弹性。

具定时功能（3分钟或5分钟），若未预设定时，机器在工作10分钟后自动停止按摩。产品规格：电压：dc 3v 干电池：aaa 1.5v × 2支（2节7号电池）

操作方法：

1、接通电源，按下开关键，进入自动循环模式，按照9个程序的顺序自动切换按摩，如果再按一下开关，机器立即停止

2、按一下功能键，自动切换一种程序

3、按下时间键，可以选择3分钟或5分钟的时间定时

以下人员请暂停使用本产品：

1、眼睛受伤或炎症的人

2、头部受伤的人

3、眼睛周围皮肤烧伤或有疾病的人

温馨提示：

1、请遵医嘱

2、高度近视患者建议在医生指导下使用

3、八岁以下儿童需要在成人指导下使用

4、当使用本产品时，不要在户外行走

5、不能一边驾驶汽车，一边使用本产品

6、眼部开刀

7、使用时最好不要戴隐形眼镜

8、儿童一次使用时间不宜超过20分钟

- 9、不要将磁石拆下来
- 10、不要强拉软性按摩钮
- 11、不要将主机摔在地上，也不能浸在水中
- 12、不要在浴室等高温地方使用本产品
- 13、电源请使用7号干电池
- 14、不能私自进行改造，拆开，修理

适合人群：

- 1、大、中、小学生近视、远视、散光，用眼过度或和工期戴眼镜引起眼睛疲劳不适者
- 2、电脑操作者，会计师，文秘，教师，长时间开车司机、精密机器工作者等耗损视力的人士
- 3、老花眼
- 4、鱼尾纹、黑眼圈及眼袋
- 5、眼痛、头痛、面部三叉神经痛、神经衰弱、失眠者

本产品的建议零售价是¥198.00，产品类别是眼保健仪，品牌是眼护士，材质是PVC，型号是ST-023，动力模式是电动，电源方式是交流电，功率是220w（W），箱装数量是40一箱，产地是上海，加印LOGO是不可以，加工定制是否，规格是17.8x7.0x6.5cm