

# 万宝吉DS-018 眼保仪 眼睛按摩器 眼保姆 眼睛按摩仪 眼护士

产品名称	万宝吉DS-018 眼保仪 眼睛按摩器 眼保姆 眼睛按摩仪 眼护士
公司名称	深圳市万宝吉科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 238.00 产品类别:眼保健仪 品牌:万宝吉
公司地址	深圳市罗湖龙岗区南联路10号佰好大厦804
联系电话	0769-84615959 13691721667

## 产品详情

深圳市万宝吉科技有限公司生产的眼部按摩仪已获得ce和rohs认证

**产品功能：** 眼部按摩仪利用22颗钕磁石分频按摩眼部各穴位是国内首创的大众化普及型新奇护眼产品，它根据中医经络学说，通过22颗钕磁同时按摩眼部穴位，刺激和锻炼视椎细胞和视神经，缓解睫状肌疲劳及长时间用眼造成的眼睛干涩和疼痛，调和气血，促进新陈代谢。在防止近视、弱视等眼疾加深的同时，还有美容眼部的功效。三种按摩力度随意调节，自动定时控制，外观时尚，颜色靓丽，是学生和女士绝佳的眼部保健小护士，也是馈赠好友的时尚礼品和促销品。 该产品采用眼镜式造型，配置可视镜面，佩戴舒适；拥有22颗钕磁粒，产生标准磁通量为600-800gs，能深入皮下3mm，n.s极相错排列，形成循环磁场，有效改善眼部及脑部的微循环，可消除眼角皱纹，黑眼圈，保护视力，提高记忆力，适用于家庭每位成员。

**产品特点：** 整体设计纤薄简练，机身采用可视镜片，佩戴时丝毫不影响视线。 每天使用眼部保健仪可有效预防眼睛近视，清除眼袋、皱纹、黑眼圈，增强皮肤弹性。 22颗钕磁组成微循环磁场，能有效消除眼疲劳，促进血液循环，可充分松弛大脑神经，对睡眠不良及失眠症有很好的疗效。 9种循环指压按摩方式，可使眼球与眼肌充分放松，降低眼内压，消除用眼过度引起的酸胀，肿痛，干涩，怕光及视物模糊等症状。 具定时功能（3分钟或5分钟），若未预设定时，机器在工作10分钟后自动停止按摩。 通过对眼部揉压，节律振动按摩，特别改善眼部血液回流，促进眼细胞运动，舒缓眼部压力，防治近视，提高学习和工作效率。适合人群：

有鱼尾纹、黑眼圈、眼袋、眼痛、头痛、三叉神经痛、神经衰弱、失眠者； 大、中、小学生，近视、远视、用脑用眼过度或长期戴眼镜引起的眼睛疲劳者； 电脑操作者、会计、设计师、文秘、教师、司机、精密仪器工作者等相关人员。

## 预防近视、美容眼部

每天三次每次三至五分钟，有效改善眼组织的微循环，提高睫状肌的调节能力，激活眼部细胞组织，增氧通络，有效改善视力，预防近视，美容眼部，明目凝神。

## 消除眼疲劳

每次闭目戴三至五分钟，可使眼球与眼肌充分放松，降低眼内压，迅速消除用眼过度引起的酸胀、肿痛、干涩、怕光及视物模糊等症状，磁场有良好的镇静作用，每晚睡前戴用五至十分钟，充分松弛脑神经，易于进入深度睡眠，消除用脑过度及神经衰弱引起的失眠症，并可缩短入睡时间。

## 减少皱纹、增强皮肤弹性

每天坚持使用五至十分钟，即可帮助消除由于睡眠不足和血液循环不畅形成的眼袋及黑眼圈，加强眼部细胞和新陈代谢。抚平眼角皱纹，使眼角的肌肤更加光泽富有弹性。

## 操作方法：

1、接通电源，按下开关键，进入自动循环模式，按照9个程序的顺序自动切换按摩，如果再按一下开关，机器立即停止2、按一下功能键，自动切换一种程序3、按下时间键，可以选择3分钟或5分钟的时间定时以下人员请暂停使用本产品：1、眼睛受伤或炎症的人2、头部受伤的人3、眼睛周围皮肤烧伤或有疾病的人

## 温馨提示：

1、请按照说明书使用2、高度近视患者建议在医生指导下使用3、八岁以下儿童需要在成人指导下使用4、当使用本产品时，不要在户外行走5、不能一边驾驶汽车，一边使用本产品6、眼部开刀或者受伤者请暂停使用，待恢复正常后可继续使用7、使用时最好不要戴隐形眼镜8、儿童一次使用时间不宜超过20分钟9、不要将钕磁石拆下来10、不要强拉软性按摩钮11、不要将主机摔在地上，也不能浸在水中12、不要在浴室等高温地方使用本产品13、电源请使用7号干电池14、不能私自进行改造，拆开，修理

## ds-018眼部按摩仪亮点介绍

1. 款式酷炫，更新潮，时尚。墨镜造型配戴时可以行走

2. 内部硅胶采用配套胶板固定，不会脱落，无味，还可拆卸清洗。（一般的眼部按摩产品是用502特制添加有干燥剂的胶水，短时间有刺激性气味，且可能会存在脱胶现象）
3. 整个外壳边缘尖角都做了弧形防划处理，不会伤到皮肤，手感好。（一般的眼部按摩产品四周都是尖角）
4. 电池门采用了易开关的款式，使用起来方便。（一般的眼部按摩产品使用单卡位难开启）
5. 采用铜芯轴特制n20马达，使用寿命长，噪音小。（一般的眼部按摩产品采用普通马达）
6. 整个产品的壳料采用新模新料抛光制作，色泽鲜明，韧性好。（一般的眼部按摩产品需要使用喷油来掩盖产品本身缺陷）
7. 按摩触头使用环保天然磁石，既美观又具有美容效果，（一般的眼部按摩产品使用滴胶处理，且表面使用镀锌，容易氧化生锈）
8. 毛面织带贴近皮肤比较舒服，采用日字扣调节长度，更易调节松紧（一般的眼部按摩产品使用魔术贴，长时间使用后毛面便被拉扯坏，无法起到粘贴作用）

产品规格：

产品型号：ds-018 主机尺寸：19.5x9.5x6.5cm 包装尺寸：22.0x18.5x10.0cm 外箱尺寸：57.5x49.5x45.5cm 装箱数量：30台/箱 毛重：9.5kg 净重：8.5kg

本产品的建议零售价是¥238.00，产品类别是眼保健仪，品牌是万宝吉，材质是ABS，型号是DS-018，动力模式是电动，电源方式是交流电，功率是0.2（W），箱装数量是40，产地是深圳市，加印LOGO是可以，加工定制是是