

# 妇科治疗仪器和LEEP刀二合一

产品名称	妇科治疗仪器和LEEP刀二合一
公司名称	西安北半天医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HH 型号:DS98F-L
公司地址	西安市灞桥区长十路一力小区8号楼2单元3层1号
联系电话	88788859

## 产品详情

品牌    HH    型号    DS98F-L

本机同时具有leep刀和自凝刀临床使用功能

ellmen-hh leep刀

采用了美国最先进的专利3.8mhz定向射频电波发射技术，由电极尖端产生3.8mhz高频射频电波于接触组

织后，因组织本身的阻抗吸收电波使组织内的水分子在电波作用下瞬间振荡汽化，引起细胞破裂蒸发，  
实

现切割、电凝、电灼、消融等功能。

特征      电磁兼容安全等级标准ellmen-hh机型是按电磁兼容规格设计的机器。包含噪声过滤器防止电磁波，抵御对外部设备的干扰。也可以搭配内窥镜手术一同使用。 3.8mhz实现了独特的电极板功能  
可以隔着衣物不接触患者的皮肤使用 天线式电极板烫伤事故发生率为零ellmen-hh的频率3.8mhz具有射  
频电波的特性，独特的电极板设计让手术没有烫伤事故发生的危险。不用特意选择接触部位独特的电极  
板设计不需要接触皮肤，只需要在靠近手术部位的位置下面平铺上就可以。并且，直接接触皮肤也是完  
全没有任何危险的。 安装简单不需要使用湿纱布和其它设置。尽可能靠近手术部位，另外让患者有尽  
可能宽广的面积。 最小成本/最大好处ellmen-hh  
leep刀独特的电极板，1个电极板可以永久使用，成本为零。

本产品手术效果远优于国内电刀改装的leep刀

一个老妇科医生的经验：

电刀改装的leep刀做手术，功率小无法切割，

功率稍大，组织表面碳化，而用3.8mhz leep刀做手术，

手术效果总是恰到好处，令人满意。

怎样鉴别真假leep刀：

将负极板表面包上一层薄塑料膜，能正常做手术，是真正3.8mhz的leep刀，

若不能正常做手术，则是普通电刀改装的劣质leep刀。

自凝刀功能

治疗原理：通过自凝刀将射频源介入到子宫肌瘤中，激发肌瘤组织进行等离子振荡，离子相互撞击磨擦产生生物热效应，当温度升高超过45摄氏度时，肌瘤组织自身发生不可逆凝固变性坏死。

治疗方法：在腹部b超监视引导下，将自凝刀经阴道、宫腔置入肌瘤中，启动rfas系统的治疗开关，自凝刀不断发射电磁波，使肌瘤组织逐渐产生生物热效应，其治疗范围不断扩大，当达到一定的凝固程度和范围时，rfas则自动报警并停止治疗。治疗安全性： 无创监视：仅用b超施行全程监视，对医患双方无创伤。 微创介入：b超清楚观察和引导自凝刀在宫腔运行，不会损伤正常组织。 定位准确：b超能清晰地监视自凝刀，并能准确地将其引导、介入到肌瘤预定部位。 效应可见：在治疗过程中，b超能准确监视肌瘤的变性过程和范围。 范围可控：确定的功率和自凝刀完全可以控制肌瘤变性范围。 程度可控：阻抗反馈控制系统可以保证肌瘤被凝固到坏死程度。 靶点治疗：自凝刀直接从肌瘤中间开始产生凝固作用。 包膜作用：子宫肌瘤外包膜具有阻止热量向外扩散的作用。技术新颖性： 精选微创介入途径。 开辟肌瘤中心靶点治疗。 采用效果确切的自凝法。 定位、定量及定性治疗。 治疗过程及效果直观、精确。临床意义： 操作过程完全在b超监视下进行，不会损伤正常组织和器官。 完全微创，治疗时间短、创伤少、痛苦小。 对女性生殖器官的结构和功能无明显损伤，以保其身心健康。 定位、定量、定性三结合的可见性治疗方法，效果确切。 各级医院的妇科医生经过一定的培训即可掌握此