

15ml炫目润眼液 5元/瓶 隐形眼镜润眼液

产品名称	15ml炫目润眼液 5元/瓶 隐形眼镜润眼液
公司名称	大连佳瞳商贸有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 20.00 品牌:炫目 材质:乙二胺四乙酸二钠,聚乙烯吡咯烷酮等等
公司地址	辽宁中山区胜利广场B2FD053
联系电话	86-041139658720 15998666968

产品详情

隐形眼镜注意事项：

- 1：每次操作前清理好自己的双手,保持指甲短而光整，佩戴之前用手指轻柔镜片。
- 2：每次配戴前检查镜片有无破损，若有破损不要勉强佩戴，如有异物，需要清洗掉异物或沉淀再佩戴
- 3：分辨镜片的面向:如成碗状则是正面，盘状为反面，反面有镜片移动过大（滑片）、视力模糊和异物感等症状。
- 4:如果发生左、右镜片混淆时，可任意取一只镜片戴在光度较深的眼上，取下镜片再戴上另一只镜片，视力清楚者为光度较深的镜片，视力稍差者为光度较浅的镜片。
- 5:浸泡消毒过镜片的陈旧护理液一定要倒弃，不可重复使用。如长时间不使用，需用充分清洗和消毒。
- 6:不使用护理液时，请保持瓶盖紧闭，勿将瓶口触及任何物品，避免污染。药水应在3个月内用完，如果没有用完，则应弃去。
- 7:避免使用自来水、蒸馏水、矿泉水、陈旧的无防腐剂的生理盐水及品质低劣的镜片护理液保养镜片。
- 8:软性隐形眼镜必须采用日戴的方式使用，每晚摘下镜片，清洁保养。
- 9:戴隐形眼镜必须用隐形眼镜专用润眼液，不得滴入其他润眼液。
- 10：隐形眼镜伴侣盒需要3个月更换一次。

11:需要化妆的女士,应在化妆之前配戴镜片,在取下镜片后卸妆.

12:隐形眼镜不要借给别人使用,因为镜片可为传染眼病乃至全身病的媒介.

13:当镜片发生对折粘连时,不要用力撕扯,强行剥开.可把镜片放在手掌上,滴上几滴多功能护理液,使其打开.如不奏效,可将镜片充分清洁冲洗后,用沸水浸泡,使其自然张开.

本产品的建议零售价是¥ 20.00, 品牌是炫目, 材质是乙二胺四乙酸二钠,聚乙烯吡咯烷酮等等, 规格是每盒60, 型号是炫目, 容量是15 (ml) , 药 (械) 准字是2013第3221605