

实拍美国进口爱尔康傲滴持久舒适355+60毫升(伴侣合)45元一瓶

产品名称	实拍美国进口爱尔康傲滴持久舒适355+60毫升(伴侣合)45元一瓶
公司名称	长沙市天心区博士明眼镜店
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 58.00 品牌: 爱尔康 规格: 见包装
公司地址	长沙市天心区青园路铁道学院总务处 1 8 号。
联系电话	86-073188621709 13973141183

产品详情

爱尔康355+60毫升和355+伴侣合,价格一样,发货随机,谢谢合作.

爱

尔康速效杀菌全护理液

opti-free™express™速效杀菌全护理液是全球市场广受欢迎的隐形眼镜护理产品,可有效去除蛋白沉积、具有清洁、冲洗、消毒、润滑、保存作用,镜片可保存在注满速效杀菌全护理液的镜盒中长达30天,药水开瓶后可放置长达6个月;100%美国本土生产,确保真正的高品质。

全天持久舒适新配方

含有持久保湿因子tetronic

1304将水分子固定在镜片上长达24小时,舒适自然持久。

每个镜片的材质都含有亲水部分(吸水部分)疏水部分(厌水部分)	tetronic 1304可使水分子同时吸附在镜片的亲水和厌水部分	将厌水部分转为亲水部分,从而可以吸引而不是排斥水分子	通过tetronic 1304的作用,镜片成为了亲水性镜片
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

强力杀菌功能，杀灭细菌、真菌、棘阿米巴

opti-free™express™速效杀菌全护理液具有双重杀菌功能，含有爱尔康专利杀菌保护剂polyquad®和aldox®，可有效杀灭镜片表面可能存在的细菌、真菌和棘阿米巴，保护双眼，避免感染。

良好的眼部安全性和舒适性

opti-free™express™速效杀菌全护理液含有的polyquad®为大分子结构，不会堵塞隐形眼镜的微孔结构，不降低镜片的透氧性，让戴上镜片的眼睛呼吸自然。

三重清洁配方，无需揉搓、清洁镜片

opti-free™express™速效杀菌全护理液中
含有三重清洁配方：天然柠檬酸、tetronic 1304和amp-95 (aminomethylpropanol)。

opti-free™express™速效杀菌全护理液三
重清洁配方的作用原理

天然柠檬酸清洁效果好，生物相容性高，对眼部无刺激。经大量研究证实，天然柠檬酸无论是在清洗、消毒或贮存镜片时均可不断去除镜片表面的蛋白沉积，其原理就在于带负电荷的柠檬酸可与带正电荷的蛋白相结合而达到清除蛋白的目的，无需揉搓就可全面去蛋白。tetronic 1304可有效乳化和清除脂性沉积。带有+电荷的amp-95(aminomethylpropanol)可在镜片表面形成防粘保护膜，防止蛋白在镜面沉积，并使蛋白等沉积物极易被清除掉。

官方网站：<http://www.alcon.com.cn/>

分类浏览：所有分类美国爱尔康(7)

爱尔康（中国）眼科产品有限公司是美国爱尔康医药有限公司在中国设立的独资公司。美国爱尔康医药有限公司是全球最大的眼科药品与医疗器械专业公司，一九七七年由雀巢公司收购。公司在全世界20多个国家和地区设立有生产机构，在180多个国家和地区开展业务，拥有12,000多名员工。爱尔康公司于2001年3月成功上市，目前是世界最大的眼科产品公司。爱尔康公司全面研制，生产并经营有关眼科的各种产品，如：各类显微手术设备，各类激光治疗仪，人工晶体，眼药及隐形眼镜护理液及耳科产品等。爱尔康公司连续7年被《财富》评为全球最受欢迎的百家雇主之一。

无需揉搓，强力杀菌爱尔康速效杀菌全护理液中含有三重清洁配方：天然柠檬酸、poloxamine和amp-95：天然柠檬酸清洁效果好，生物相容性高，对眼部无刺激。经大量研究证实，天然柠檬酸无论是在清洗、消毒或贮存镜片时均可不断去除镜片表面的蛋白沉积，其原理就在于带负电荷的柠檬酸可与带正电荷的蛋白相结合而达到清除蛋白的目的，无需揉搓就可全面去蛋白。poloxamine可有效乳化和清除脂性沉积。amp-95可在镜片表面形成防蛋白沉积保护膜，防止蛋白在镜面沉积，并使蛋白等沉积物极易被清除掉，无需揉搓就可以使镜片干干净净。双重杀菌功能，杀灭细菌、真菌、棘阿米巴。爱尔康速效杀菌全护理液中含有爱尔康专利杀菌保护剂polyquad和aldox®。可有效杀灭镜片表面可能存

在的细菌、真菌和棘阿米巴，保护双眼，避免感染。极佳的眼部安全性和舒适性爱尔康速效杀菌全护理液含有的polyquad为大分子结构，不会堵塞隐形眼镜的微孔结构，不降低镜片的透氧性，让戴上镜片的眼镜呼吸自然。多年的观察证明polyquad不会伤害角膜组织，眼部过敏率低于1%。欧美市场广受欢迎的隐形眼镜护理产品爱尔康速效杀菌全护理液是经过美国fda批准的具有杀菌能力的全护理液，无需揉搓即可有效去除蛋白沉积，具有清洁、杀菌、保存、湿润作用，镜片可一直储存于旋紧的镜盒中最长30天，药水开瓶后可放置长达6个月。100%美国本土生产，确保高品质。隐型眼镜使用方法

con知识2008-12-22 14:50:24阅读354评论0字号：大中小

使用方法一、包装瓶的开启方法

*铝条难以开启的情况如果你遇到用手已经无法开启时，请使用适当的工具如钳子等。*隐形眼镜被粘在瓶底时请用手抓牢包装瓶，挡住已经开启的瓶口，让瓶口向下并轻轻摇晃，眼镜即可脱落。*开启后取出眼镜时瓶体内配送有保护隐形眼镜的保护液，去镜片时请利用瓶内液体的流动作用将液体连同眼镜片一同倒入盘子类的器皿中。*禁止用镊子等坚硬工具取出镜片由于瓶口较小，工具的使用范围受到限制，加之硬物与镜片接触容易损伤、划伤镜片。

二、佩戴及取出方法

1、洗干净手后,在戴镜片之前要确认镜片是否有异常。特别是要确认镜片的正面和背,观察正面和背面是不是弄反了。2、戴镜片之前确认镜片的正确状态和反过来的状态。3、如镜片折叠或紧贴在手中,就将新鲜的食盐水充分洒在镜片上,并用手轻轻地柔柔。这样仍无效果就把镜片浸泡在食盐水中,一直到恢复到原形。经过粘上了的时候,千万不要碰它。只要充分放入食盐水过一个晚上就会恢复到原来状态。1、把隐形眼镜放到右手食指上,看好镜片的正面并用左手的中指轻轻地打开上眼皮,然后用持镜处的手轻轻地打开下眼皮,此时眼珠子露很大,就在这时候,把镜片轻轻地贴在眼部中间。镜片碰到眼珠上,就往下看的同时把手放开,这样镜片才能正确到位。2、如果戴上之后感到不舒服,可以眨一眨眼睛,使得镜片找到正确的位子,并维持眼睛的均衡。

- 1、洗手并晾干手上的水份。
- 2、用左手中指抓上眼皮,用右手中指抓下眼皮,然后上下拉开。
- 3、视线要往上看,食指触到镜片底部。
- 4、利用食指将镜片推向眼白中。
- 5、用拇指和食指分别在时钟7点和5点的方向将镜片取出来

三、护理时的注意事项

- 1、每天均须更新护理液体，最少要隔三天仔细清洗一次，用肥皂把手洗干净，倒护理液在手心，把镜片放上去，用食指按摩正反面各15次；
- 2、免揉搓消除蛋白质的护理液只炒作概念，必须揉搓镜片并仔细清洗。不然蛋白质会沉积在镜片上，引起视物模糊。镜片的寿命也会缩短。
- 3、按摩完了，再用夹子夹住镜片，用干净的护理液，旋转镜片正反面并冲洗干净。

4、冲洗完毕镜片后,放在伴侣盒子里面泡，护理液须淹没镜片浸泡，每天不得少于六小时，注意不要让伴侣盒的盖子碾过镜片，以免碎裂。

5、长期不戴，请隔二天更新一次护理液。

6、如果长期不戴，你决定明天要戴了，那今天晚上所有的护理程序必须重新做一次哈。还有请不要戴眼镜过夜，戴镜片过夜将使角膜处于无氧状态，长期容易引起过敏及发炎。

四、首次使用时的注意事项

为避免突然导致眼睛缺氧，初次配戴隐形眼镜者应逐步延长配戴时间，适当戴用时间可参照下表(停戴两周以上的配戴者也执行初戴者的戴用时间)，首次使用前必须将镜片浸泡在护理液中6小时以上。

本产品的建议零售价是¥58.00，品牌是爱尔康，规格是见包装，型号是傲滴，容量是355+60（ml），药（械）准字是2008第3222078号