

临沂暖贴批发厂家暖宝宝袋鼠暖贴暖身贴安全

产品名称	临沂暖贴批发厂家暖宝宝袋鼠暖贴暖身贴安全
公司名称	山东临沂大山商贸
价格	.38/片
规格参数	品牌:袋鼠 型号:标准贴 13:9
公司地址	山东临沂兰山区美多商贸城1268号
联系电话	6177857 13465391377

产品详情

产品尺寸：133*100mm 发热时间：6-12小时左右 平均温度：52 最高温度：63
箱装：300贴，14公斤 箱子规格：50*25*25 商品净重：单片装约43克，20片为一公斤 产品材质 该品为片状贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使暖贴粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层，粘结牢固，绝不污损衣物。作用原理 1、暖贴中的原料层可以在空气中氧气的作用下12-20小时内持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开真空包装的时候开始的。2、人体各部份都存在局部的微循环系统，为机体的各部份输运营养，排出体内垃圾。中医理论强调"通则不痛，痛则不通"，意即当人体经常受寒侵袭，局部的微循环系统发生阻滞时，使相应机体既得不到营养，又无法排出废物，就会产生痛疼，进而引起病变。而暖贴的持续放热可以促进人体微循环进入良性循环状态，恢复正常的生理机能，从而消除疼痛，治疗疾病。作用功能

一贴即热，快速热敷、消肿、止痛、活血化瘀，广泛适用于各种畏寒症。1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等疾病患者迅速止痛的即开即用型产品。

2、驱寒保暖，促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。

3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。

4、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。使用方法 将暖贴的真空包装沿切入口打开，揭去暖贴后面的衬纸，贴于内衣的外侧，用手铺平即可。可贴于人体的肩部、背部、腰部、胃部及相关关节部位。使用完后，扔入垃圾箱。适用范围 1、用于风湿、关节炎、痤疮、劳损引起的疼痛、麻木、肿胀。

2、用于受寒引起的胃肠病、腹泻、腹痛等。3、妇女痛经、产后收腹。4、外伤恢复期理血散瘀。

5、滑雪、钓鱼、打猎、郊游、野外作业时取暖。6、房间内低温时取暖。7、按摩的热敷等。注意事项

1、使用时要贴于内衣的外侧，不要直接贴于人体皮肤上。2、请注意低温烫伤，就寝时请不要使用，在被窝中使用或与取暖设备并用时，会使温度升高，请勿使用。

3、糖尿病、孕妇和血液循环障碍者，皮肤热敏感度低者，请在使用时注意。

4、小孩，高龄者，不能自理者应在特别看护下使用。

5、若包装内容物不慎接触到眼睛要立即用清水冲洗并就医。识食后要立即催吐并就医。

6、请避免在同一位置长时间使用，并注意确认皮肤状况，如有异常立即取下。

7.远离孩童，暖贴不宜直接贴于皮肤上使用，不可使用破烂暖贴。