

配药柜SJ-PYG1600

产品名称	配药柜SJ-PYG1600
公司名称	上海苏净实业有限公司
价格	面议
规格参数	型号: SJ-PYG1600 品牌: 上海苏净 种类: 医用台
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢三楼3106室
联系电话	13918851350 13701933845

产品详情

产品名称：配药柜 产品型号：sj-pyg1600 产品特点和说明：这是专门为医院输液治疗前的配药操作而设计开发的，配药柜采用高效空气净化、药检灯、自控加温药液的技术，可造成一个局部高洁净度的配药操作空气环境，并可对所配药液进行预先升温和光检澄明度。可在医院各科室集中或分散使用，适合icu、制剂室、门诊、急诊使用。工作时，将经过了过滤的空气由风机压入静压箱，再经两级高效过滤器由操作区顶部以垂直层流状向下送出，操作区底部以大于进风的风量将操作区内气流及空所吸出，从而在操作区内形成负压环境，确保操作区内的气体不会外泄，并利用负压气流使工作台中受药物污染的气体经定向过滤后(达到万级)排出，将挥发的有害药物粒子吸附在高效过滤器上，过滤效率达99.99%，既防止了有害药物危害操作人员和污染周围环境，又使配药过程保持洁净无菌状态。1.配药柜上柜为负压风道,使工作区与外部环境形成气幕及箱体双层隔离,同时工作区被正压气流包围,保证药品不受室内空气污染；2.箱体部分采用1.5mm厚的冷轧钢板,增强了结构强度,整个装置更加稳重；3.工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐；4.控制面板采用触摸式开关,使机器外形美观,易于操作； 型号及技术参数：

序号	指标/型号	sj-pyg1600
1	洁净等级	100级@ 0.5 μ m(美联邦209e)
2	菌落数	0.5个/皿·时(90mm培养皿)
3	平均下降风速	0.3m/s (可调)
4	噪音	58db
5	电源	ac , 单项220v/50hz
6	光照度	300lx
7	振动半峰值	3 μ m (x.y.z方向)
8	最大功耗	800w
9	相对湿度	85%
10	温度	5 ~40
11	大气压力	86kpa~106kpa
12	重量	<250kg
13	工作区尺寸w*d*h	1450 × 540 × 600mm
14	装置外形尺寸w*d*h	1600 × 695 × 2200mm

操作说明1. 接上220v、50hz的交流电源；2. 如果设备送、排风过滤器达不到规定的要求，设备就会通过声光报警，提示使用者立刻更换过滤器，以保护使用者的安全；3. 按下电源键，压差显示默认为送风压差，数值为零；4. 电源键按下之后，其它功能键才能使用：照明、加热保温、风机、风量调节、显示内容切换。5. 配药前开启配药柜风机净化空气30分钟，净化配药间后，再开始进行配药操作；6. 澄明度光检方法：在对药液进行光检澄明度时，将装有药液的药瓶倒置于灯下，灯光不照射药瓶，用白色衬板观察药液中深色杂质，然后灯光照亮药瓶，用亚光黑色衬板观察药液中浅色杂质。配药过程中如发现药液浑浊、沉淀、结晶、变色等异常现象时，应立即停止操作，查明原因并解决后方可继续；7. 控制板上显示的温度是温度传感器测量点的气体温度，而非瓶内药液温度，通常情况下瓶装药液放入加热保温柜内加热2~4小时后，控制面板显示在30~35℃时，药液温度能够达到30~37℃。因此，需要配制的药液应在配药操作前2~4小时放入加热保温柜内加热。8. 请确认患者本人是否需要使用经加热的药品，或者患者的病情是否适合使用经加热的药品。请确认药品是否可以被加热而不会引起品质的变化。注意事项1. 在连接交流电源之前，要确保电源的电压与配药柜的输入电压一致且电压稳定，并确保电源插座的额定负载不小于该要求；本配药柜使用接地插头，这种插头带有第三脚，只能配合接地型电源插座使用，这是一种安全装置。如果插头无法插入插座内，则应请电工安装接地型电源插座；2. 在设备使用过程中，不要将软质、细微的物品（例如：软纸巾）放在台面上，以免其被吸入口吸进负压风道和风机中，影响装备运行；3. 避免震动：柜内尽量避免震动仪器（例如离心机、旋涡振荡器等）的使用，因为震动会使得积留在滤膜上的颗粒物质抖落，导致操作室内部洁净度降低。同时，如果在前操作面平衡失败还会引起配药柜对操作者的污染；4. 明火禁用：配药柜内禁止使用明火！在明火使用过程中会导致配药柜内气流紊乱、并会损伤过滤器。在实验过程中需要高温消毒灭菌，强烈建议使用红外线灭菌器；5. 高效过滤器有其使用寿命，随着使用期的延长，尘埃及细菌积聚于过滤器会导致高效过滤器压力损失的增大，当增大到发出报警声时，须及时与我公司服务部门联系，更换高效过滤器，否则会影响装备的安全性能。更换下的过滤器按照医疗垃圾处理。6. 风机及其下侧钢板是静压箱盖，后侧门是负压风道挡板，这些风道在出厂时经过严格密封处理，需保持其密封性，操作者不得松懈或拆除这些部件的螺丝钉，如有特别需要，必须由本公司服务人员处理；7. 台面上靠近前面的隔栅被用于进风，在操作配药柜时，不要挡住隔栅，这样会影响配药柜的气流。建议使用搁手架，就可以解决这个问题，并能减少操作人员的手腕疲劳；8. 挂钩上悬挂的所有物品总重量请勿超过5kg；9. 设备的存储期为一年，超过存储期的必须由本公司技术人员开箱检验一次，合格后方可使用。

本产品的型号是SJ-PYG1600，品牌是上海苏净，种类是医用台