

肛门袋 肛门圈 北京

产品名称	肛门袋 肛门圈 北京
公司名称	北京市房山区黎明橡胶制品厂
价格	面议
规格参数	药（械）准字:京药监械（准）字2011第1660881号 原产地:北京 产品注册证:京药监械（准）字2011第1660881号
公司地址	北京市房山区窦店镇交道三街村南
联系电话	69369238 13641110020

产品详情

北京市鑫田黎明医疗器械有限公司

北京市房山区黎明橡胶制品厂

联系电话：（010）80318330 80317604 69371376

联系人：张经理

手机：13801037818

量大从优，欢迎致电！

编号	产品名称	规格	材质	单价（元）
Im-o3-1	肛门袋	组合型	乳胶	9
Im-o3-2	肛门袋	直型	乳胶	6.5
Im-o3-3	肛门袋	扁型	乳胶	7
Im-o3-4	肛门圈		橡胶	3

系列人工肛门袋用于各种结肠治瘻术后病人排泄粪使用具。

一．组成 主要由乳胶肛门袋和橡胶肛门圈组成。

二．产品规格尺寸 肛门袋分直型和扁形两种，规格尺寸应符合表1的规定

表1 规格尺寸

名称	口径 (mm)	长 (mm)	宽 (mm)	厚 (mm)	橡胶肛门圈外直径 (mm)	橡胶肛门圈内直径 (mm)
直形	53 ± 5	215 ± 15	90 ± 15	0.6 ± 0.2		
扁形	53 ± 5	145 ± 15	87 ± 15	1.8 ± 0.2		
圈内孔					83 ± 5	48 ± 5

注：特殊规格尺寸由供需双方另行商定。

三．物理性能 1．肛门袋的物理性能应符合表1的规定。

表2 物理性能

型号	性能名称	单位	技术要求
肛门袋、肛门圈	拉伸强度	mpa	不小于4
	硬度	邵尔a	30 ~ 50
	扯断伸长率	%	不小于200
	热空气老化试验	%	± 20

2.耐高温 肛门袋承受水温100 煮沸15min不变形、不发粘。3.漏气 在充入2kpa的气体后放置2min,肛门袋不会有漏气现象。4.外观 肛门袋、肛门圈的外观性能应符合下列要求：

- a) 肛门袋为半透明、浅黄色，厚薄均匀，不漏气，卷边良好；
- b) 肛门圈圆正，修边整齐，不允许有污渍，颜色基本一致，并有4个圈眼。

四．清洗、消毒 肛门袋每次使用完毕必须进行清洗、消毒。应用洁净水冲洗清洁后再用70%-75%酒精擦拭，防止交叉感染。

五.使用方法 a) 使用前应检查肛门袋是否有漏气，确认无漏气后方可使用。 b) 打开包装取出肛门袋，将该产品放入病人肛门处，排泄粪使用。

六．适用范围 该产品用于各种结肠治瘻术后病人排泄粪使用具。

七．禁忌事项 如有橡胶或乳胶过敏者禁用。

八．注意事项 a)肛门袋如有破损，漏气应弃用。 b)家庭、个人使用请遵医嘱。

九．包装、运输、贮存9.1肛门袋的包装，应符合下列要求： a)必须有中性材料的内包装； b)大包装箱上应有防潮、抗压措施，应能保证产品在正常贮、运条件下不受自然损坏。9.2随带文件 肛门袋的单位（袋）包装内，应附有产品使用说明书和检验合格证各一份。9.3运输 肛门袋在运输时，应防止重压，阳光直晒和雨雪的直接淋袭。其他要求按订货合同规定。9.4贮存 包装后的肛门袋贮存，应防止日晒，距热源不小于1.5m，禁止与酸、碱、油类等物质接触，干燥、清洁，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

本产品的药（械）准字是京药监械（准）字2011第1660881号，原产地是北京，产品注册证是京药监械（准）字2011第1660881号，产品等级是一级，有效期是36（月），一次性使用是是