

# 医用 铝合金腋下拐杖 批发 伸缩双拐 九档 弹珠可调

产品名称	医用 铝合金腋下拐杖 批发 伸缩双拐 九档 弹珠可调
公司名称	衡水普博医疗器械厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 66.00 品牌: 普博 产品类别: 登山杖
公司地址	河北 冀州市 魏屯镇东町村356号
联系电话	86-03188978004 15369879091

## 产品详情

**产品尺寸** 九档弹珠调节间距共为20cm，每档间距2.5cm。最大高度136cm，最小高度116cm。1档拐杖高度116cm；2档拐杖高度118.5cm；3档拐杖高度121cm；4档拐杖高度123.5cm；5档拐杖高度126cm；6档拐杖高度128.5cm；7档拐杖高度131cm；8档拐杖高度133.5cm；9档拐杖高度136cm。

扶手调节间距共12cm。腋下距扶手最大间距52cm，最小间距40cm。1档距离40cm，2档距离44cm；3档距离48cm，4档距离52cm。

(以上数据全部为人工测量，不排除1~2厘米的误差)

### 【拐杖使用须知】

**拐杖长度调节方法：**1，抓住拐杖上端部分，按住调节键，拉长拐杖，到自己感觉合适的调节位置即可。在调节键进行拉、缩调节时，注意要确认听到拐杖“咔嗒”一声，表明调节键调整到位。特别提醒：如果调节键没有确认调整到位，即没有听到“咔嗒”声时使用拐杖，那么，只要一用力，拐杖就有可能被压缩变短，这样恐怕会有不安全事情发生。

**手柄调节方法：**左时针拧下螺母，拔下螺栓，把橡皮手把调至合适位置，插上螺栓，然后旋紧螺母即可。

**拐杖收缩法：**拐杖调到长度调节键的最短处的调节孔。

**注意事项：**1.选择跟自己身体相配的拐杖；2.使用前仔细检查各个部位后再使用。如发现拐杖端部橡胶破损、磨损、以及其他异常情况，及时更换；3.随时注意在使用过程中出现的松动等异常情况；4.在易滑路边等处使用时要特别小心；

拐杖弄脏后，应用柔软干布擦拭；拐杖使用后，必须放置在干燥的环境里保存。

本产品的建议零售价是 ¥ 66.00，品牌是普博，产品类别是登山杖，材质是铝合金，重量是1000（g），货号是PB-023，产地是河北，颜色是铝合金