

出口型 家用泡泡气床垫、 医用气垫床--质优

产品名称	出口型 家用泡泡气床垫、 医用气垫床--质优
公司名称	招远市冠亚电子厂
价格	面议
规格参数	药（械）准字:鲁烟食药监械（准）字2012第1560010号 类别:医护辅助设备 功能:防褥疮
公司地址	招远市开发区天府路南首（金丰实业公司一楼）
联系电话	13386459697

产品详情

冠亚气体波动型气垫床cwat-1产品介绍

引起褥疮最主要的缘由是部分组织遭受继续性垂直压力，特别是在身体骨头粗隆凸的部位。如果长时间卧床或是坐轮椅、夹板内衬垫放置不妥当，石膏内不服整或有渣屑等，部分长时间接受超越正常毛细血管的压榨，均可形成褥疮。（一般来说皮肤层下的血管可接受的压力约为32mmhg左右，假如超越以上的压力部分血管可能歪曲、变形而影响到血液流通不舒畅的现象）

产品名称：冠亚气体波动型防褥疮气垫条形cwat-1

品牌：冠亚

型号: cwat-1冠亚气体波动型气垫床cwat-1技术参数：

气泵：电源电压 ac220v电源频率 50hz熔断器 t1a,250v输出功率 10w尺寸（长*宽*高）
22.5*12.5*8cm重量 1.0公斤交替时间 每10分钟交替循环压力范围 115-135mmhg瞬间最大出气
量 > 4.5l/min噪音 小于50db床垫：材质：床管nylon/pvc;底座nylon/pvc尺寸（长*宽）：200
*90cm最大载重：150公斤重量：4.5公斤

适宜人群：长期卧床的病人

禁忌：产品保养--在移动、保养、维修本产品时应首先将电源插头拔下，切断电源。1、气泵应放在干燥清洁的地方，在气泵底部有钢丝钩，可以挂在病床上，也可以放在病床下的地上，但要防潮、防灰尘。2、气垫应避免长时间暴露在日光中，以减缓气垫的老化速度。3、气垫的清洁应在充气的状态下进（防止清洁剂渗入气垫内腔），可用中性的清洁剂。清毒时，请用75%酒精擦拭，晾干后使用。4、使用一段时

间后（一般三个月，视使用环境而有所不同），应对机壳底下的过滤片进行清洗，具体步骤如下：a、拧开气泵底壳上过滤片盖的螺丝，将过滤片盖及过滤片一起取出。b、用清水冲洗滤片，如果污垢粘着较牢固，可在流水中浸泡。c、将过滤片晾干后装回过滤片座，盖上过滤片盖，并固定好。5、运输和储存：温度-40 -55 ，湿度10%-93%，大气压力：800-1060hpa，且无腐蚀性气体，通风良好的室内。运输时，还应注意防潮、防震、避免剧烈冲击；搬运时，小心轻放，并按规定向上放置。 注意事项：条纹式防褥疮垫如漏气，应检查各条纹两端头接头处是否有松脱现象。 切勿接触尖锐物质，以防划破或刺破气囊，造成漏气。 注意清洁卫生，经常用中性洗涤剂清洗表面。 注意：防酸、防碱。

成分：本产品由气垫、导管、气泵三部分组成。

使用说明：1、气垫的铺设：务必将印有“此面向上”字样的一面向上放置，因为这面上开有喷气微孔，对治疗褥疮起着关键作用。如果铺反了将影响褥疮防治的作用。铺气垫时应将进气口放在患者的脚端，以尽量减少气流噪音声对病人的影响。将气垫放在床垫上时，对棕木或钢丝床务必要放上一层垫被后再将气垫放上去，以免气垫被硬质的棕木或钢丝磨破。2、使用方法：将防褥疮床垫平放在床上，条纹型、方格型床垫上加一层床单。喷气型床垫上可以铺垫床单或薄毛毯，但不能铺塑料布、橡胶尿片等通气不良的物品，用了这些物品将影响气垫喷出的空气的流动，治疗效果将大大降低。将充气管和充气泵连接好，确保安全环进气和导管不被折弯，影响空气流通。床垫可以采用本公司提供的气泵与床垫连接，以确保24小时自动充气。3、褥疮防治用喷气气垫的连接：在气垫的进气口和气泵的出气口之间用塑料导气管连接。在使用中要防止连接管打折，影响空气流通。4、电源的连接：将气泵电源插头插入电源插座中，再将电源开关打开，这时电源开关上的绿色指示灯亮，气泵开始工作。5、气泵调节器：调节器可以调节气垫的软硬程度，调节器旋钮上的“|”向左，气垫变软；向右变硬。气垫硬一些防褥疮效果好一些，应根据情况作调整。正常情况下，“|”的指向应在实践范围内调节，特殊情况或长期使用后，“|”指向可调到虚线范围内。6、冬天病人感到冷的问题：冬天若病人感到冷时，可以在病人脚下放上汤壶或在气垫下面铺上电热毯（方格除外）。

qq：1352487216 454285780

电话：13386459697 18606316468 13386459695

本产品的药（械）准字是鲁烟食药监械（准）字2012第1560010号，类别是医护辅助设备，功能是防褥疮，尺寸是200*90cm(充气后)，材质是PVC3PLY，名称是气垫