

水果味（草莓味）退热贴加工 小儿护脑降温贴批发 ISO认证

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 水果味（草莓味）退热贴加工 小儿护脑降温贴批发 ISO认证 |
| 公司名称 | 广州市拜澳生物科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 药（械）准字:粤穗食药监械（准）字2010第1580011号 |
| 公司地址 | 广州市越秀区东华南路19号1901房自编01室（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 83644002 15876530871 |

产品详情

【产品名称】冷敷贴

【产品型号】儿童退热型（trt-01）

参考规格有：4cm*11cm，4.5cm*11.5cm，5cm*12cm

【主要成分】亲水性高分子凝胶、水、薄荷等

【产品主要结构、性能】退热贴由背衬层、凝胶层、防粘层三部分组成。利用亲水性高分子凝胶所含的大量水分和挥发精油进行扩散、交换，通过水分汽化和挥发作用带走热量，从而达到退热降温的治疗目的。

【适用范围】适用于各种原因引起的发烧、头痛、鼻塞、烦躁等辅助治疗及应急物理降温，缓解发烧、烦躁、头痛头昏等不适症状，也可协同减少发烧对大脑细胞的损害。

【适用人群】儿童型适用于3月龄以上婴儿及12岁以下儿童。普通型适用于各类人群。

【使用方法】沿缺口撕开包装袋，取出贴剂，揭开透明胶膜，直接敷贴于额头或太阳穴，也可敷贴于颈部。一天1-2次，每贴可持续使用8小时。本品揭下后冷敷效果还会持续一段时间。如高温持续不退，应请医生诊治。

【注意事项】勿贴于有伤口、敏感性的皮肤、近眼睛及嘴部位置。使用中若有不适或偶有皮肤表皮发红，停用后可消失。本品为外用贴剂，请勿误食；儿童须在成人监督下使用。

【储存方法】保存在阴凉、避光、儿童不易触及之处。开封后宜早使用，剩余贴片放回原包装，并将开口封好，冷藏后效果更佳。请勿放入冷冻室。

本产品的药（械）准字是粤穗食药监械（准）字2010第1580011号