

# 眼罩保健用品 客户自订 广州

产品名称	眼罩保健用品 客户自订 广州
公司名称	广州市增城三川橡胶制品厂
价格	6.00/个
规格参数	品牌:客户自订 产地:广州 贸易属性:其他
公司地址	广州市增城区永宁街长岗村石桥吓(土名)
联系电话	86 020 82983871 13509287185

## 产品详情

品牌 客户自订 产地 广州  
贸易属性 其他

<p>功能：能清除疲劳与失眠,改善眼部血液循环.治疗头痛,头晕,面瘫,青光眼,弱视结膜炎. 小孩防近视,司机抗疲劳,中老年人防眼花,妇女抗眼皱,斑纹.美容每次15-20分钟,7天为一疗程.</p> <p>任何有按摩功能的仪器（如经络通治疗仪、美容仪器）都能使用。</p> <p>适用方法：1、使用本品前，先清洁眼部周围。2、将本品与中（低）频脉冲治疗仪的导线连接好，起到保健按摩作用。3、打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，再取下存放好，以备下次使用。注 项：1、本品可多次反复使用。3、贮藏：在阴凉处保存。治疗原理:双电极附于人体相应治疗部位，使治疗仪正 通，治疗仪产生的脉冲波通过眼罩电极，像无数电针进行模拟针灸及按摩治疗。</p>
--

功能：

保健：清除疲劳与失眠，清斑除皱，提高视力，改善眼部血液循环，柔润眼肌，防止眼袋下垂，清脑明目。

使用范围：头痛，头晕，偏头痛，面瘫，三叉神经痛，鼻窦炎，鼻炎，耳聋，耳鸣，中耳炎，近视老花，青光眼，弱视，斜视，近视，结膜炎，红眼病，砂眼等。

能量导线的插针分别插入按摩触点的左右两侧插孔内。调节能量输出强度大小，进入眼部理疗按摩状态（仪器的具体操作请参照仪器说明书）。

#### 注意事项：

1、眼睛受伤或有炎症的人，请暂停使用；2、头部受伤的人，请暂停使用。3、眼睛周围皮肤烧伤或有疾病的人，请暂停使用。4、600度近视至800度近视患者建议在医生的指导下使用，800度以上近视患者不适合使用。5、当使用本产品时，不要在户外行走。6、不能一边驾驶汽车，一边使用本产品。7、使用时最好不要戴隐形眼镜。8、儿童一次使用不宜超过20分钟。9、不要将主机摔在地上，也不能让它浸水中。10、请不要在浴室等高温地方使用本产品。11、使用时请闭上眼睛，使用后，可用手指轻揉眼部周围，按摩后的红点会很快消失。