

# 外贸公司首选 止血带 压脉带 卡扣止血带 可印刷LOGO

产品名称	外贸公司首选 止血带 压脉带 卡扣止血带 可印刷LOGO
公司名称	乐清市康顺塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:浙（温）食药监械（准）字2011第1640028号 生产许可证:浙（温）食药监械（准）字2011第1640028号 产品注册证:浙（温）食药监械（准）字2011第1640028号
公司地址	乐清市北白象镇旺林村（注册地址）
联系电话	86-0577-62887916 13587888326

## 产品详情

印刷费用另记,中性常规包装松紧带长度以 $45 \pm 1$ cm为准,

1个/pe袋, 25只/中盒, 500只/箱46\*43.5\*37cm毛净重: 20kgs /17kgs

海关编码: 3006100000或者5806320090

### 使用说明

#### 【产品性能结构】

产品压脉带由松紧带, 锁扣及卡扣由abs材料制成, 主要用于用于医疗救治中输血, 输液, 抽血, 止血时使用的一种一次性止血带, 由松紧带, 锁扣及卡扣三部分组成, 将松紧带一端卡扣扣在松紧带上锁扣上, 根据实际需要长度拉紧松紧带即可。

【适用范围】主要用于手臂静脉注射和抽血时扎紧手臂。

【禁忌症】对松紧带过敏者禁止使用

#### 【注意事项、警示及提示性说明】

- 1) 包装破损时, 禁止使用;
- 2) 严禁由不熟练或未经培训的人员使用;

3) 使用后按照法律要求及所在医院的感染控制规定处置废物。

#### 【使用说明】

打开小包装，取出压脉带，轻压压脉带锁止阀上的按钮，卡扣自动弹出，拉出约20-35cm长度的松紧带，视病人上手臂的粗细而定，再将卡扣插回锁止阀，这样就形成7-12cm的压脉带圆环。将圆环套入病人输液（血）的上臂，拉紧松紧带直至符合常规输液状态。由于病人静脉受压，血液回输时受阻，静脉扩张，在静脉扩张处即可插上输液（血）针，在完成输液（血）常规观察后，即可轻压压脉带锁止阀上的按钮扣，卡扣自动弹出，松开压脉带后取出。即可进行常规输液。

本产品的药（械）准字是浙（温）食药监械（准）字2011第1640028号，生产许可证是浙（温）食药监械（准）字2011第1640028号，产品注册证是浙（温）食药监械（准）字2011第1640028号，卫生许可证是浙（温）食药监械（准）浙（温）食药监械（准）字2011第1640028号字2011第1640028号，备案证是浙（温）食药监械（准）字2011第1640028号，灭菌方式是高温，有效期是36（月），一次性使用是是