

欧姆龙HEA-230血糖试片 HEA-231血糖试条 HEA-STP30血糖试纸

产品名称	欧姆龙HEA-230血糖试片 HEA-231血糖试条 HEA-STP30血糖试纸
公司名称	北京永红英俊科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:津食药监械（准）字2011第2400035号 生产许可证:津（食）药监械生产许字20100314号 灭菌方式:高温
公司地址	北京市东城区西革新里60号3-1-10号
联系电话	010-87809124 13391979149

产品详情

欧姆龙hea-stp30血糖试纸（适用于hea-230、hea-231、hea-232型血糖仪）

市场价：¥ 135.00

qq：1743219172电话：010-51282852手机：13391979149邮箱：yhjklp2008@126.com网址：<http://www.yhyj2008.com.cn>地址：北京市崇文区木樨园桥北沙子口西革新里60号 盛购中心三楼3-110号

适用范围：适用于欧姆龙hea-230、hea-231、hea-232血糖检测仪。

包装规格：瓶装，25片/盒，外配25个针头。

注意事项：1、第一次使用或使用新的试纸前请确认代码（详见使用说明）。

2、为了您的安全，请勿与别人共用一根采血针。

3、血糖试条只适用人体末端血。例如：指血、耳血、手臂等。

4、试纸打开后（与试纸条直接接触的小包装），一定要在5分钟内测试完。

5、试纸买回家后，要储存在温度在5 - 35度的环境中。

6、试纸要保持在干燥的环境中，受潮的试纸不能使用。

7、试纸要在有效期内使用完，不要用过期的试纸。

8、手拿试纸条时，注意不要沾试纸条的吸血口；可以沾其它的地方。

储存条件及有效期：贮藏：干燥避光密闭保存，不能冷冻；储存温度：+5 ~ +35 ；储存湿度：不大于93%；有效期：12个月，拆包后5分钟内使用。

参考值：空腹血糖：3.9mmol/l ~ 6.1mmol/l（70 ~ 110mg/dl）；餐后1小时：小于10.0mmol/l（小于180mg/dl）；餐后2小时：小于8.3mmol/l（小于150mg/dl）；餐后3小时：小于7.2mmol/l（小于130mg/dl）。

本产品的药（械）准字是津食药监械（准）字2011第2400035号，生产许可证是津（食）药监械生产许字20100314号，灭菌方式是高温，有效期是12（月），一次性使用是是