

推出高品质铭医 针灸针 一次性使用无菌袋装针灸针

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 推出高品质铭医 针灸针 一次性使用无菌袋装针灸针 |
| 公司名称 | 长春国翰科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 药（械）准字:吉食药监械（准）字2013第2270166号 产品注册证:吉食药监械（准）字2013第2270166号 灭菌方式:r射线 |
| 公司地址 | 长春市高新开发区 |
| 联系电话 | 86-043185186066 18943615767 |

产品详情

塑料袋包装：，医用复合膜包装袋，包装5支/10支/20支。经“伽玛（ γ ）射线”辐照灭菌，符合【gb 16352—1996】一次性医疗用品 射线辐射灭菌标准。在传统针灸针的基础上，进行了多次的改进，针体挺直圆正、光滑流利、富有良好的弹性、韧性、强度、抗腐蚀性强、光洁度高、手感优良，针尖造型新颖、一致性好、锋利适度、便于进针、不会钩伤肌肤、无痛感；且适用于各种病症、用针少、见效快、疗效高，对调节人体阴阳平衡、提高机体免疫和治疗有明显的

a、超麦芒型：

针尖细长，适用于皮质厚的患者使用，进针轻松自如。

b、麦芒型： 针尖略细长，适用于皮质较厚的患者使用，进针方便。

c、松针型： 针尖略肥，适用于皮质较细的患者使用。使用方法：1、根据患者的病症、个人因素及进针部位，选择适当规格型号的针灸针。2、检查包装盒之有效期，过期的针灸针严禁使用。3、打开包装盒，检查所用一次性针灸针的包装，有无打开或损坏现象，如有打开或损坏，请勿使用。4、撕开独立包装，取出针灸针。5、根据不同的患者进行针刺。注意事项：1、一次性使用无菌针灸针贮存在温度 40℃，相对湿度 80%，无腐蚀气体，通风良好的室内。2、如果产品包装有明显打开和损坏的现象，请勿使用。3、非专业人士请勿使用。4、一次性使用无菌针灸针不准重复使用，以防交叉感染。5、使用后的针灸针请投入专用废弃箱中。

本产品的药（械）准字是吉食药监械（准）字2013第2270166号，产品注册证是吉食药监械（准）字2013第2270166号，灭菌方式是r射线，有效期是24（月），一次性使用是是