

# 一次性使用无菌弹簧柄多种型号无菌针灸袋装单支管针

产品名称	一次性使用无菌弹簧柄多种型号无菌针灸袋装单支管针
公司名称	长春爱康医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:吉食药监械（准）字2013第2270166号 产品注册证:吉食药监械（准）字2013第2270166号 灭菌方式:辐照灭菌
公司地址	长春九台经济开发区卡伦工业园区25号
联系电话	13578616005 15143119888

## 产品详情

a、塑料袋包装：，医用复合膜包装袋，包装5支/10支/20支。经“伽玛（ ）射线”辐照灭菌，符合【gb 16352—1996】一次性医疗用品 射线辐射灭菌标准。

b、管针 pvc和透析纸独立包装：进口材料，单支包装，完全符合一次性使用医疗器械规定。环氧乙烷灭菌，符合【gb 18279-2000】医疗器械 环氧乙烷灭菌确认和常规控制标准。

c、单支塑料条包装：独特包装形式，使用方便，单支包装，完全符合一次性使用医疗器械规定。经“伽玛（ ）射线”辐照灭菌，符合【gb 16352—1996】一次性医疗用品 射线辐射灭菌标准。

a、超麦芒型：

针尖细长，适用于皮质厚的患者使用，进针轻松自如。

b、麦芒型： 针尖略细长，适用于皮质较厚的患者使用，进针方便。c、松针型：

针尖略肥，适用于皮质较细的患者使用。使用方法：1、根据患者的病症、个人因素及进针部位，选择适当规格型号的针灸针。2、检查包装盒之有效期，过期的针灸针严禁使用。3、打开包装盒，检查所用一次性针灸针的包装，有无打开或损坏现象，如有打开或损坏，请勿使用。4、撕开独立包装，取出针灸针。5、根据不同的患者进行针刺。注意事项：1、一次性使用无菌针灸针贮存在温度 40℃，相对湿度 80%，无腐蚀气体，通风良好的室内。2、如果产品包装有明显打开和损坏的现象，请勿使用。3、非专业人士请勿使用。4、一次性使用无菌针灸针不准重复使用，以防交叉感染。5、使用后

的针灸针请投入专用废弃箱中。

本产品的药（械）准字是吉食药监械（准）字2013第2270166号，产品注册证是吉食药监械（准）字2013第2270166号，灭菌方式是辐照灭菌，有效期是24（月），一次性使用是是