

拧式拔罐，12只/盒，筒装

产品名称	拧式拔罐，12只/盒，筒装
公司名称	济南市中康利达健身用品中心
价格	面议
规格参数	药（械）准字:鲁济食药监械（准）字2010第1270013号 产品注册证:鲁济食药监械（准）字2010第1270013号 卫生许可证:鲁济食药监械（准）字2010第1270013号
公司地址	中国 山东 济南市 英雄山路
联系电话	86 0531 66620086

产品详情

拧式拔罐的原理与功能：

有5个规格，abs料制作。红色。（其中有2个异型的，可以用于关节部位拔罐。）

有6只和12只包装盒。可以为代理商贴牌。

火罐疗法是根据气体热胀冷缩在罐内形成负压，此负压使人体皮肤与肌肉组织受到很大吸力而高度充血，引起血管扩张，血流加快，新陈代谢旺盛，机体组织营养得到改善，从而反射地增强了白血球的吞噬能力。

拧罐是根据玻——马定律，以机械形式在罐内形成比火罐更大的负压值，具有比火罐更高的治疗效力。其中装有磁片的罐将拔罐法与穴位磁场疗法相结合，具有磁疗功能，若利用活塞体螺杆前端半球头按压腧穴，起到点穴功能；如果使花瓣螺母与活塞体螺杆脱离啮合时，用花瓣螺母在身体酸痛部位滚动起到按摩作用；在皮肤上涂搽拔罐活络剂，将罐吸在皮肤上平行推动罐筒，拔“走罐”。手握罐筒利用罐口内缘刮酸痛部位，起到刮痧作用，且因手握的罐筒是圆筒形，比刮痧板得心应手。

【使用方法】：

首先通过旋转花瓣螺母调整活塞端面至罐口，然后将罐口接触拔罐部位且适度下压，右旋花瓣螺母即可产生吸力，待患者感觉吸力适宜时即止。卸罐时，左旋花瓣螺母。放置时，必须使活塞与罐口平齐，这样可使密封圈放松，延长使用寿命。

注意事项

- 1、心搏动处、眼、耳、鼻、口、乳头、孕妇的腹部和腰骶部位禁拔。
- 2、高烧抽搐、高度神经质、烦躁不安、全身皮肤病、高度浮肿、体质十分虚弱、癌瘤晚期、恶病质、皮肤失去弹性、凝血机制障碍者等不宜拔罐。
- 3、当旋拧花瓣螺母感到费力或太松，则需将花瓣螺母右旋一下后，再左旋，直到将活塞拆下，洗净，然后在活塞的胶圈和罐筒内壁表面均涂上瀑布蛙剂，装好即可再用。
- 4、拔罐时间一般为5—15分钟（吸力大，时间短），同一穴位，隔1—2天后再拔，其他穴位循环治疗，7—10天为一个疗程。疗程间隔3—5天（或等痕迹消失）。特别说明：我们无法保证其它品牌的同类产品也具有同样性能。功效。

本产品的药（械）准字是鲁济食药监械（准）字2010第1270013号，产品注册证是鲁济食药监械（准）字2010第1270013号，卫生许可证是鲁济食药监械（准）字2010第1270013号，灭菌方式是酒精，有效期是36（月），一次性使用是否