

# 零售批发上肢约束带，脚腕约束带，膝部约束带 新超医疗

产品名称	零售批发上肢约束带，脚腕约束带，膝部约束带 新超医疗
公司名称	安平县新超医疗器械贸易有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:冀衡食药监械（准）字2007第1100 038号 品牌:金亿康 型号:大中小
公司地址	安平县新政村448号
联系电话	15906687899 13785832223

## 产品详情

产品名称：医用固定带

规格：大、中、小号

四肢约束带主要用于临床上对癫痫大发作、谵妄、躁动者进行四肢的约束时使用。

使用方法：

在专业人员指导下使用。将医用固定带垫于使用部位后，搭扣扣在前部，调整两边的松紧带至舒适的位置。

禁忌症：

孕妇、有出血性倾向、恶性肿瘤、皮肤病患者禁用

本款可固定床护栏上，两脚之间可固定住，并调节活动范围（工型扣调节方便

躁动、无意识、神志混乱等需要约束辅助康复护理病人使用！

本款主要约束脚腕、脚踝部分，以防双脚无意识乱踢造成护理事故！

去掉双脚中间的绳子也可作为手腕约束带使用

产品名称：脚腕约束带

产品包含：约束带1对装

约束部位：脚腕脚踝

产品材质：透气网眼布，工型扣

#### 约束带使用的目的

对可能自伤的病人限制其肢体活动，保证安全。保证躁动病人治疗护理的顺利进行。（避免无意识翻动引起坠床或起身引起护理事故）

#### 约束带适用人群

- 1、重症（icu）无意识的卧床病人；
- 2、认知障碍、行为紊乱病人；
- 3、评估有摔倒危险的病人；
- 4、精神错乱有损伤自己或他人倾向的病人；

#### 约束带使用注意事项

- 1、使用约束带时，松紧适宜，并注意保持病人肢体处于功能位；
- 2、严密观察约束部位的皮肤、末梢循环情况；
- 3、如为制动措施，病情稳定或治疗结束后，应及时解除约束；
- 4、需要长时间约束者，应每2小时松解约束带1次并活动肢体，同时协助病人翻身；
- 5、记录约束的原因、时间、约束带的数目、约束部位及皮肤状况（针对病房护理）；
- 6、解除约束的时间，并做好交接班(针对病房护理)。

产品可以直接清洗，反复用。

#### 临床使用约束带可能造成的损伤提醒

- 1、身体约束所致生理损伤

**【直接损伤】**约束后可致末梢神经丛张力过高而导致神经损伤和肌肉萎缩，试图从约束中挣脱站起或坐

起而导致窒息,长时间挣扎导致的猝死等。

【间接损伤】院内感染发生率增加,自主活动和定向功能退化,压疮等。

## 2、身体约束所致心理和社会层面的损伤

使一个完整的人失去了尊严,如笼中鸟和监禁一样。病人家属会产生消极感。也有家属认为病人恢复的可能性很渺茫。病人易激怒和精神紊乱。

停止使用约束工具的原则

- 1、精神状况好转;
- 2、有能力遵从预期的行为;
- 3、不需要限制活动;
- 4、有工作人员看护。

icu重症监护使用约束用品的建议【理论来源于美国重症监护学会发布的《身体约束实践指南》】

- 1、为保证病人尊严,又不能忽视病人医学上的需要,机构与医务人员应致力于最少地约束病人,保障病人的安全(c级推荐);
- 2、必须在病史中记录下身体约束的使用原因,身体约束医嘱有效时限在24 h内,而且必须每8 h重新评估停止约束或减少约束的可能性(c级推荐);
- 3、使用身体约束时,病人和家属应该接受有关身体约束的性质、该病人需要身体约束的病情缘由的解释和指导(c级推荐);
- 4、身体约束不应作为常规手段,只有在病人临床必须约束时,经反复评估才可应用;选择身体约束时必须是对病人最少侵犯,而又能达到最好的病人安全保证(c级推荐);
- 5、接受神经肌肉阻滞剂治疗的病人,应该保持其镇静、镇痛和麻醉状态,并频繁观察病人情况,以降低药物所致的远期后遗症的发生。同时重申,不能将神经肌肉阻滞剂作为化学约束的手段(c级推荐)。

身体约束是最后的手段,只用于利大于弊时;必须使用时,尽可能应用最少的约束装置,以尽可能保持病人最大的功能活动度,有利于人身安全和有利于治疗;一旦开始约束,必须反复持续评估约束是否应继续下去。

产品名称:医用固定带

规格:大、中、小号

四肢约束带主要用于临床上对癫痫大发作、谵妄、躁动者进行四肢的约束时使用。

使用方法:

在专业人员指导下使用。将医用固定带垫于使用部位后，搭扣扣在前部，调整两边的松紧带至舒适的位置。

禁忌症：

孕妇、有出血性倾向、恶性肿瘤、皮肤病患者禁用

联系电话 0318-7512736新超医疗器械有限公司

手机 13785832223 闫经理

新超医疗竭诚为您服务

本产品的药（械）准字是冀衡食药监械（准）字2007第1100038号，品牌是金亿康，型号是大中小