

# 手持式耳温枪 高品质人体测温仪

产品名称	手持式耳温枪 高品质人体测温仪
公司名称	深圳市联合利德电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NIDA 型号:NDT368 类型:手持式
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙二西环新村16巷1号
联系电话	13713784555

## 产品详情

购买样板请移步淘宝店铺：

<http://efan.tmall.com/>

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

外形尺寸：

尺寸:117mmx35mmx35mm

净重:45g

电池:3v(cr2032x1)

技术规格：

测量范围：34 -44.2

被测物体低于34 显示lo

被测物体高于44.2 显示hi

使用环境：

温度：16 -35

湿度： 80%rh

保存环境：

湿度：30%rh-90%rh

显示精度：0.1

测量精度：±0.1(36 -39 )

测量精度：±0.2(34 -35.9 &39.1 -44.2 )

显示屏显示信息说明

出现该图标表示可以测量;

出现该图标表示电池电量低，请更换电池；

出现该图标表示测量值锁定完成；

单位图标;

出现该图标表示当前显示的数据为记忆历史数据;

储存体内的记忆序号;

出现该图标表示被测物体的温度高于42.2 ；

出现该图标表示被测物体的温度低于34 ；

开机等候图标.

1.当显示屏出现scan的时候将探头放进耳朵里，马上按一下scan按键，听到滴的一声测量完成，整个过程不需要2秒钟。

2.等到scan图标再次闪烁就可以进行第二次测量了.

不要长时间将测试探头放到耳朵里!

注意：

1.在测量之前请将体温计放在环境温度环境里30分钟。

2.请保持耳朵清洁，耳朵里有异物会引起测量不准。

3.当体温计屏幕上scan这个字符闪烁时才可以将体温计的探头放进耳朵。

- 4.每次测量请最少间隔10秒钟，也不要长时间的将探头放到耳朵内.
- 5.请保持探头上的玻璃体清洁，请勿划伤，否则会影响精度。
- 6.如果按开关屏幕没有显示，请更换电池再试。
- 7.如果你耳朵有疾病请不要使用入耳式体温计。
- 8.如果你需要用这个体温计测量多个人的体温请用干净的软布清洁探头，然后长按scan按键3秒中，重置系统，保证测量的准确。
- 9.如果损坏外观和探头产品将失去保修.

本产品的品牌是NIDA，型号是NDT368，类型是手持式，适用对象是人体测温仪，测量范围是34—42，测量精度是0.1，分辨率是0.1，尺寸是117mmX35mmX35mm（mm），重量是45（kg），加工定制是是，规格是117mmX35mmX35mm