

富林牌 额戴 反光镜 额镜 耳鼻喉科 专用

产品名称	富林牌 额戴 反光镜 额镜 耳鼻喉科 专用
公司名称	济南树隆商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:富林 型号:额镜
公司地址	山东济南市市中区西红庙
联系电话	86 0531 87561599 18660179356

产品详情

额镜及其使用

额镜（head mirror）镜面为一能聚光的凹面反光镜，焦距约25cm，中央有一小孔供窥视用，镜体借一转动灵活的双球状关节联结于额带上，关节松紧以镜面能灵活转动又不松脱为度。额镜戴于前额正中，使用时将镜面调整与额面平行，中央镜孔应正对检查者的右眼或左眼（图2-1），先让光源投射到额镜上，再调整镜面，使光线反射聚焦到检查部位，此时检查者视线向正前方通过镜孔，看到反射光束的焦点进行检查（图2-2）。一般检查鼻部时焦点集中于鼻尖部，咽喉集中于悬雍垂，耳部则集中于外耳道口。

额镜的使用方法

头灯：在额镜附有光源，对光方便，多用于手术中。

使用额镜时注意事项：应保持瞳孔、镜孔、反光焦点和检查部位成一直线，以使检查部位明亮清晰。检查时姿势端正，不得扭颈、弯腰、迁就光源。额镜与检查部位宜保持一定距离，不应太近或太远。光源投射方向与额镜距离、额镜反光角度均应仔细调整准确，否则影响效果。

本产品的加工定制是是，品牌是富林，型号是额镜，测量范围是耳鼻喉，测量精度是00，外形尺寸是80（mm），用途是耳鼻喉专用，标准装箱数是10（pcs），长度是14（mm），放大率是85，工作温度是30（°C），十字线是0，视野是150（m@100m），物镜直径是9（mm），序列号是0021122154，重量是0.5（Kg），规格是额镜