

不锈钢助行器拐杖老人残疾人代步手杖可折叠助行器伸缩助步器

产品名称	不锈钢助行器拐杖老人残疾人代步手杖可折叠助行器伸缩助步器
公司名称	衡水滨湖新区耀强医疗器械厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 140.00 品牌:耀强 材质:不锈钢
公司地址	河北 衡水市 滨湖新区 魏屯镇
联系电话	86-03188960233 13323083526

产品详情

本厂专业生产 医疗病床 护理床 电动床 坐便椅 助行器 腋下拐杖 四角手杖 手杖凳 自发热护具 等产品

本品为不锈钢助行器，永不生锈。

本产品特为国内外医疗器材公司及助行器贸易商指定代加工生产商，现为了更多的优惠到广大需求人士需要，现省去了中间环节，最大让利给客户，特价销售，数量无限，欢迎垂询)

产品功能及规格参数

产品名称：不锈钢交互式助行器

产品构造：轻质钢管（特点硬度高重量轻患者首选）；手握采用防滑握手材料；

产品特点：本产品才用按钮式卡簧弹性调节高度，调节方便；采用优质轻钢管，轻便又牢固耐用；可折叠，便于携带安放；手握部位采用 p s c 材料，让使用者更加舒适；流行线设计，美观大方；仿滑脚套，仿滑又减震；

产品使用：无说明书

高度可以调节.不锈钢助行器。 可以折叠,储藏及携带方便；

手握部分采用防滑材质外包，不易脱手；

脚部配有橡胶底托，增加与地面的摩擦力，使用更加安全

采用高轻材质，整体轻便、耐用、净重量3.6公斤 扭动式（交互型），比老式固定式更方便
协调性更强、更省力！

【使用说明】：

使用时先向前移动一侧，然后再移动余下的一侧向前，如此来回交替移动前进，适用于立位平衡差，下肢肌力差的患者或老年人!!1

1:使用时双手握住两侧手把处，先向前移动一侧，然后再移动余下的一侧向前，如此来回交替移动前进；比老式固定式更方便、使用协调性更强、更省力！

2:折叠时请按下中间卡簧按钮，再从两边往里合上既可

产品尺寸：

调节高度范围（6档调节）：最低约74cm，最高约90cm，每增加（或者减少）一档，升降2.5cm；承重力260斤；方便不同身高需要

两边间距：约50cm左右。

产品颜色：

产品生产销售：加厚不锈钢永不变形，承受力强。进出口贸易产品。

产品适合人群：适合下肢功能不全的患者或需要辅助支撑行走的患者康复使用；

特别适用于立位平衡差，下肢肌力差的患者或老年人；本产品尤其是上厕所也可以很方便使用

特别提示：

1：本店所有产品7天无理由退换服务，2年保修服务；请放心购买

本品为高档电镀助行器（步行器），永不生锈；按下中间弹簧顶扣即可折叠存放；助行器采用高新扭动式设计，使用时可以先向前移动一侧，然后再移动余下的一侧向前，如此来回交替前进，比老式固定式更方便、使用协调性更强、更省力！采用高轻金属材质，整体重量只有3公斤左右(由于助行器本身是框架结构，在双手握起移动的时候，感觉非常的轻便，根本连3公斤的重量都感觉不到)；可调6个高度档~并在四个脚部配有弹簧顶扣，只需用手按下即可自行调节助行器高度，手握部分采用防滑材质外包，不易脱手；助行器脚部配有橡胶底托，增加与地面的摩擦力，使用更加安全；中间配有加固横条，使助行器更坚固、耐用，产品选用高轻材质，更轻便！

本品可用于下肢康复锻炼，辅助行走，支撑身体。

【产品特点】 高度可以调节,卡簧设计,只需用手按下即可进行6档高度调节； 可以折叠, 储藏及携带方便； 手握部分采用防滑材质外包，不易脱手； 脚部配有橡胶底托，增加与地面的摩擦力，使用更加安全 采用高轻加厚不锈钢材质，整体轻便、耐用、 扭动式（交互型

)，比老式固定式更方便，使用协调性更强、更省力！

【使用说明】：

使用时先向前移动一侧，然后再移动余下的一侧向前，如此来回交替移动前进，适用于立位平衡差，下肢肌力差的患者或老年人，尤其是上厕所也很方便。助行器介绍 可调节高度

另一侧手撑床,健侧腿着地。患侧手再握助行器离床,扶助行器站立。先前移助行器一足距离,身体向前移动,患肢抬起,让患者足后跟着地,逐渐全足放平在地上,然后再移动健肢,如此交替,注意尽量走平衡,不要着急,逐渐加重... 腿部有伤及行走不方便的病人练习走路

本产品的建议零售价是¥140.00，品牌是耀强，材质是不锈钢，货号是02，规格是70*50，箱装数量是6个，产地是河北衡水，加印LOGO是不可以，加工定制是是，型号是02，药（械）准字是冀衡食药监械（准）字2013第1260057号