

年中大促欧姆龙压缩式雾化器 NE-C30 呼吸道疾病吸入器理疗仪器

产品名称	年中大促欧姆龙压缩式雾化器 NE-C30 呼吸道疾病吸入器理疗仪器
公司名称	广州市创品贸易有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:辽食药监械(准)字2011第2540038号 品牌:欧姆龙 型号:NE-C30
公司地址	中国 广东 广州市荔湾区 广州市荔湾区花湾路650 号国览国览医疗器械层首层129铺
联系电话	86-02029880188 13922718865

产品详情

我们是欧姆龙公司的授权代理经销商，

100%正品，售后有保障！

独特高效的v.v.t雾化技术,实现有效的吸入治疗

操作简便，适合婴幼儿到老年人各年龄层使用

适合家用的压缩式吸入器

ps：还有便携式背包，方便外出携带

为什么要选择【压缩式雾化器】，而不是超声雾化器？

小孩咳嗽，哮喘呼吸道疾病最好使用压缩雾化器，因为小孩的呼吸道比较细，超声雾化器的雾化颗粒较大，不宜进入下呼吸道。

而这款压缩雾化器是通过压缩机压缩空气经过雾化杯产生雾气，雾化颗粒较小，是治疗下呼吸道的好仪器。

目前使用多的是欧姆龙雾化器，一般医院都有用，带面罩小孩比较喜欢，小孩咳嗽，哮喘，最好的治疗仪器。小孩很容易感冒咳嗽的，每次一咳嗽带到医院去就是开那些常吃的药，再作雾化，因为没有医院那种作雾化的机器，每天都得在跑医院，很累。购买一款家用雾化器，省事省心，经济实惠！

此款欧姆龙雾化器ne-c30适用于哪些病症？

可使用支气管扩张剂、抗过敏剂、类固醇药剂等药物，

适用于哮喘、慢性阻塞性肺炎、支气管扩张、感冒、发热、咳嗽、咽喉肿痛、鼻炎、慢性咽炎、扁桃体炎、肺气肿、粘稠物阻塞症、及需要湿化气道、稀释痰液等病症。

压缩雾化器的喷雾原理是什么？

本体内部的压缩器产生的压缩空气从喷嘴喷出时，通过喷嘴与吸水管之间产生的负压作用，向上吸起药

液。吸上来的药液冲击到上方的隔片，变成极细的雾状向外部喷出。

欧姆龙c28与c30功能对比

型号	ne-c28	ne-c30
消费功率	140w以下	120w以下
噪音	60db以下	60db以下
喷雾速率	约0.4ml/分钟	约0.22ml/分钟
喷雾粒子直径	直径5 μ m以下的雾粒子所占比例大于60%	直径5 μ m以下的雾粒子所占比例大于60%
适当药液量	2ml~7ml	2ml~7ml
重量（仅主机）	约1.9kg	约440g
电源	ac 220v 50hz	ac 220v 50hz dc 12v
外形尺寸	170mm*103mm*182mm	124mm*103mm*52mm

欧姆龙c28与c30优劣对比

型号	ne-c28	ne-c30
连续使用时间	1000小时以上	20分钟， 再次使用仅需间隔40分钟
药剂残留	0.3ml以下	0.7ml以下
雾化颗粒稳定性	平稳	不稳定
便携性	不能携带	可携带

注意事项

1、如雾化器座的内径可穿过已套有撞击球帽的雾化器，可不取下雾室端头直接插入已调到喷雾状态的雾化器。2、如雾化座不能穿过已套有撞击球帽的雾化器，可取下雾室端头，将已取下撞击球帽的雾化器插入雾化器座并固定，套上撞击球帽，按下法调到最佳喷雾状态后，将雾室端头回装到雾室上并紧固。3、喷雾调节：吸喷纯净水（提升量应大于4ml / min），将撞击球帽抵拢喷口并来回旋转，同时观察喷出的雾气流状态，最佳期状态为：向前喷，各侧对称，夹角较大，成平面散开，调好后撞击球帽的连接杆应在向下左右45度角内。

产品简介：

1、如雾化器座的内径可穿过已套有撞击球帽的雾化器，可不取下雾室端头直接插入已调到喷雾状态的雾化器。

2、如雾化座不能穿过已套有撞击球帽的雾化器，可取下雾室端头，将已取下撞击球帽的雾化器插入雾化器座并固定，套上撞击球帽，按下法调到最佳喷雾状态后，将雾室端头回装到雾室上并紧固。

3、喷雾调节：吸喷纯净水（提升量应大于4ml / min），将撞击球帽抵拢喷口并来回旋转，同时观察喷出

的雾气流状态，最佳期状态为：向前喷，各侧对称，夹角较大，成平面散开，调好后撞击球帽的连接杆应在向下方左右45度角内。

11大配件：

主机1台，雾化杯1个，送气管1条，吸嘴1个，吸入面罩（小）1个，过滤片5个，过滤片盖1个，携带包1个，说明书、合格证和客服服务一览表各1份。

主机1年免费保修，终身维修！

附带的配件因为是消耗品不包括在保修内的。不需要任何单据作保修证明，只要在我店购买的我们都会有记录。什么？怕我日后不帮您保修？就算我欺骗一个顾客，我也不可能欺骗千万在我店购买产品的顾客吧。做生意都是希望长期做下去的，信誉好的店才能永远得到客人支持。（只有您的最大满意，才是我们最大的希望）

创品承诺您，凭以下任一凭证，即可享受完善的售后服务：

1.创品盖章的专有收据。

（凡在我司购买任何产品，均附有创品的红联送货单。）

2.阿里中网或淘宝网购买成功的记录。

如对我们的产品感到满意，请给好评，如对我们的产品不满意，请随时来电投诉。

欧姆龙(中国)有限公司，十大电子血压计品牌，全球知名品牌，中国优秀诚信企业，世界领先品牌，全球知名自动化控制及电子设备制造厂商。

1933年，立石一真先生在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂，当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外，后来一度专门生产保护继电器。这两种产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展，在公司成立50周年纪念时，公司名称与品牌名称实现了统一，改为“欧姆龙株式会社”。

无触点接近开关，电子自动感应信号机，自动售货机，车站自动售检票系统，癌细胞自动诊断仪... 欧姆龙在世界上率先开发并生产出一系列产品与设备系统。为社会的进步与提高人类的生活水平作出贡献。创造社会需求，构筑“安心”，“安全”，“环保”“健康”的社会是欧姆龙的企业发展目标。

自1933年5月10日创业至今的75年中，通过不断创造新的社会需求，欧姆龙集团已经发展成为全球知

名的自动化控制及电子设备制造厂商，掌握着世界领先的传感与控制核心技术。截止到2008年度，欧姆龙集团已经拥有员工32,583人(2009年4月)，全球营业额近6,272亿日元。产品品种达几十万种，涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。

本产品的药（械）准字是辽食药监械(准)字2011第2540038号，品牌是欧姆龙，型号是NE-C30，规格是124mm*103mm*52mm，货号是NE-C30，材质是见说明