

鱼跃轮椅车H007型 手动轮椅车 可折叠 老年人轮椅

产品名称	鱼跃轮椅车H007型 手动轮椅车 可折叠 老年人轮椅
公司名称	广州普慈医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:H007 品牌:鱼跃 种类:轮椅
公司地址	广州、荔湾区、花湾路650号、医械诚240
联系电话	020-81600622 15920442388

产品详情

产品运费由买家出，多少运费就联系客服，选择好快递物流

020-62740323

使用方法：展开轮椅：双手握住手握,使左右车架微微张开,在坐垫两侧用手心轻压至坐垫平整处,轮椅车展开
轮椅折叠：先将左右脚踏板向上翻起、用两手向上轻提坐垫两端，即可折叠。脚踏板调节：如需调节脚踏板，请使用配套工具松开锁紧螺栓或锁紧螺母。调节到适合位置后，锁紧螺栓或螺母即可。升降腿的调整：如使用者需调节升降脚的角度，向上时只需轻提腿靠管，向下时只需用手向下轻轻扳动升降手柄，调到合适位置后，松掉升降手柄即可。升降脚上腿靠垫也可用转动的方法进行调节。背靠角度的调节，只须将自己轻靠于背靠管上，在用双手轻轻向下拉调节法兰，有四孔可供调节。（注意：使用者在调节背靠管角度向后躺时，一定要使用防倾管。调节时，只须用手指轻压弹销，转动防倾管朝地面即可）
跨越障碍物的安全使用：在行驶时，如遇障碍物，请陪伴者双手紧握住把手部位，并用脚用力踏着后底管，使前轮抬高，越过障碍物。

产品保养：

- 1、轮椅使用一段时间后,必须检查各部位机动,螺栓是否松动,若有松动现象应及时调整。
- 2、活动部位应经常添加润滑剂。
- 3、轮椅使用后，应擦干表面水气、污染擦干净，防止生锈。
- 4、坐垫、靠背等应保持干净，以防止肌肤感染。

使用注意：

- 1、轮椅车在没气和气压不足情况下，请不要使用，否则会损坏车胎，车胎充气时应注意气压合适，不要过满防止车胎爆胎。
- 2、刹车是用来在上、下轮椅车时停靠不平道路时我能顶轮椅车的作用，不是用来制动行驶中的轮椅车的。
- 3、轮椅使用者严禁坐在轮椅车上被任何形式的运输车辆运输。
- 4、在使用轮椅前请在有陪伴者的情况下联系使用轮椅。
- 5、在没有防倾装置的轮椅车上，请不要坐在轮椅上做后扬动作。
- 6、在使用轮椅的情况下，请不要向一般倾斜轮椅，不可抬起轮椅。
- 7、严禁在行进过程中使用刹车，如果在无陪伴者情况下，可握紧手推圈，逐渐制动。
- 8、严禁使用者站立在踏板上，会使轮椅翻倒。

本产品的型号是H007，品牌是鱼跃，种类是轮椅