

# 一次性医用耗材 压脉带 止血带

产品名称	一次性医用耗材 压脉带 止血带
公司名称	新乡市万泰医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:鲁临食药监械（准）字2013第1540019 原产地:山东 产品注册证:临食药监械（准）字2013第1540019
公司地址	蒲东新区新运公司路东
联系电话	0373-8813199 13837336484

## 产品详情

本公司供应产品种类齐全、质量正品、量大从优、批发电议。欢迎新老客户来电咨询、订购！

联系人：李经理，联系电话：138 3733 6484，客服热线：0373-8813199。

亲!感谢您的到访和支持，因为您的支持，大家才能互惠互利，合作共赢，工作事业蒸蒸日上！

能给您带来质量满意、价格合适的产品，是我最大的欣慰！

以下为产品简介：

中性常规包装松紧带长度以 $45 \pm 1$ cm为准,

1个/pe袋，25只/中盒，500只/箱46\*43.5\*37cm毛净重：20kgs /17kgs

海关编码：3006100000或者5806320090

## 使用说明

### 【产品性能结构】

产品压脉带由松紧带，锁扣及卡扣由abs材料制成，主要用于用于医疗救治中输血，输液，抽血，止血时使用的一种一次性止血带，由松紧带，锁扣及卡扣三部分组成，将松紧带一端卡扣扣在松紧带上锁扣上，根据实际需要长度拉紧松紧带即可。

【适用范围】 主要用于手臂静脉注射和抽血时扎紧手臂。

【禁忌症】 对松紧带过敏者禁止使用

### 【注意事项、警示及提示性说明】

- 1) 包装破损时，禁止使用；
- 2) 严禁由不熟练或未经培训的人员使用；
- 3) 使用后按照法律要求及所在医院的感染控制规定处置废物。

### 【使用说明】

打开小包装，取出压脉带，轻压压脉带锁止阀上的按钮，卡扣自动弹出，拉出约20-35cm长度的松紧带，视病人上手臂的粗细而定，再将卡扣插回锁止阀，这样就形成7-12cm的压脉带圆环。将圆环套入病人输液（血）的上臂，拉紧松紧带直至符合常规输液状态。由于病人静脉受压，血液回输时受阻，静脉扩张，在静脉扩张处即可插上输液（血）针，在完成输液（血）常规观察后，即可轻压压脉带锁止阀上的按钮扣，卡扣自动弹出，松开压脉带后取出。即可进行常规输液。

本产品的药（械）准字是鲁临食药监械（准）字2013第1540019，原产地是山东，产品注册证是临食药监械（准）字2013第1540019，产品等级是一级，灭菌方式是环氧乙烷，有效期是36（月），一次性使用是是