

理疗马甲 远红外电热马甲 发热背心 理疗背心 玖健远红外电热背心

产品名称	理疗马甲 远红外电热马甲 发热背心 理疗背心 玖健远红外电热背心
公司名称	上海玖健康复器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玖健 基本投资额:0.5-1万(元) 保证金额:0(元)
公司地址	上海市闵行区光华路2118号第7幢141室
联系电话	13636501010

产品详情

让冬天不再寒冷 买温暖更买健康

上海玖健康复器材有限公司成立于二零零七年，公司主要致力于家庭医疗用品的开发与生产。本公司多项产品荣获国家实用新型专利和发明专利，其中实用新型专利产品“电热马甲”在交警系统和国家电网得到一致好评，并在二零壹壹年配属国家海洋局南极科考队。实用新型产品“热能护具”系列、“腰力挺”护腰也以其独特功能和超越品质遥遥领先同类或类似产品。发明专利产品“踏步训练机”用于偏瘫、截瘫的日常锻炼得到所有用户的高度评价。

玖健电热马甲采用碳纤维发热，无磁场，无辐射，释放远红外线激活生物大分子的活性，促进和改善血液循环、增强新陈代谢、提高人体免疫功能，针对多种慢性疾病有较好理疗作用。

联系电话：4008 850 877 15821980575 qq:280984905

玖健电热马甲简介

玖健电热马甲采用碳纤维发热，无磁场，无辐射，释放远红外线激活生物大分子的活性，促进和改善血液循环、增强新陈代谢、提高人体免疫功能，针对多种慢性疾病有较好理疗作用。

远红外线作用肌体以后，大部分能量被肌体吸收并转化成热能，通过丘脑反射使平滑肌松弛，血管扩张，血循环加快，另一方面由于热作用引起血管活性物质的释放，血糖、血脂加速转化，血管张力降低，浅小动脉，浅毛细血管和浅静脉扩张，血液循环加快并改善。

高血压、糖尿病、头痛头晕、失眠多梦、皮肤衰老、胸闷心慌、心律不齐、咳嗽哮喘、支气管炎、肠胃功能紊乱、腹泻、胃溃疡、肾衰、盆腔炎、男性前列腺炎等等，有较好理疗作用。

万病源于血液循环，人体血液循环发生障碍可导致多种疾病，循环保持良好可使人精力充沛，机能旺盛。

标准配置参数

产品名称：玖健电热马甲 v领

生产厂家：上海玖健康复器材有限公司

服装面料：绒布

标配电池：4400毫安聚合物锂电池（约200克）

电热片：4片

充电器：1个

档 数：共五档

使用时间：档位5最高温度55～60度 持续时间5.5小时左右

档位4最高温度50～55度 持续时间6.5小时左右

档位3最高温度45～50度 持续时间7.5小时左右

档位2最高温度40～45度 持续时间8.5小时左右

档位1最高温度40度左右 持续时间10小时左右

使用方法

- 1、锂电池不接负载，锂电池不能开机。
- 2、锂电池不接负载时，短按（持续时间小于2秒）按钮，数码管显示当前电量，数字下方有小数点。
- 3、锂电池连接负载后，长按（持续时间大于2秒）按钮，锂电池开始有输出，默认为最高档，显示数字5（无小数点），间隔2秒钟，循环显示当前档位和电量，（表示电量的数字下方有小数点，档位的数字下方没有小数点。）

- 4、调节档位时，只需轻按按钮，档位依次降低--5、4、3、2、1、关机。5档表示最高输出功率，1档表示最低输出功率。
- 5、放电过程中，表示当前剩余电量的数字逐渐从5.降到1.（数字下方有小数点）。当剩余电量减少到1.时，数字开始闪烁，提醒用户锂电池处于低电量状态。
- 6、充电时，锂电池的数码管电量，显示当前电量，数字下面的小数点闪烁，表示正在充电，当锂电池充满电时，数字5下方的小数点不再闪烁，同时充电器指示灯变成绿色，表示电量已经充满。

衣服尺码表

尺码	适合身高cm	肩宽cm	衣长cm	胸围腰围cm
m	150-159	36	58	94
l	160-169	38	60	100
xl	170-179	40	62	106
xxl	180-189	42	64	112
xxxl	190-199	44	66	118

清洗及注意事项

清洗说明：请在清洗马甲前，先取下电池、发热片（连接插头），并确认马甲完全干透后再连接使用。

注意事项：1、建议不要长时间使用高档温度，以免灼伤。

2、电池、发热片（连接插头）、充电器应防止进水，如果发现连接插头带水，应立即停止使用，待水完全干透后再继续使用。

3、孕妇、幼儿及无法正常表达意愿者禁用。

4、患有严重心脏病者及带有心脏起搏器者禁用。

5、出血及具有出血倾向者禁用。

6、请不要随意分解、改装、拆卸电池、发热片（连接插头）、充电器及控制线路，防止人为损坏发热部件，使用过程中若出现问题请向本公司或经销商咨询处理。

本产品的品牌是玖健，基本投资额是0.5-1万（元），保证金额是0（元），加盟费是0（元），项目区域要求是北京，预计回报率是100（%）