

# 牙科自凝牙托粉 齿科自凝牙托粉

产品名称	牙科自凝牙托粉 齿科自凝牙托粉
公司名称	广州市蓝野齿科器材有限公司
价格	面议
规格参数	产品名称:齿科自凝牙托粉 外观性状:瓶装 类别:其他
公司地址	广州市白云区沙太公路华苑街18号厂内自编12号2层02之一
联系电话	13609783862 13822265116

## 产品详情

自凝牙托粉 不带血丝基托树脂粉

生产厂家：上海新世纪

色号：2号 3号

100g/瓶

使用方法1. 粉液调和：建议粉 / 液 = 22g / 10ml，搅拌时动作要轻，以免人为产生气泡。2. 静置溶胀：粉液调和后随时间有如下变化：湿砂期 糊状期 粘丝期 面团期 固化。其中面团期是最柔软可塑，不粘器械的最佳充填期。3.在20 ±0.5 初装盒时间约为10分钟，终装盒时间约为20分钟。4.加热固化：型毋需加热，料团填入石膏模型后，在常温下快速固化后再行修改和抛光。5、建议使用常规分离剂。三、注意事项1.操作者必须经过专业培训，操作时远离明火。2.溶胀过程中应尽量减少液体的挥发。3.操作者的皮肤不要长时接触未固化的树脂、单体等。4.避光、避热贮存，远离火种和有机溶剂并注意防潮

本产品的产品名称是齿科自凝牙托粉，外观性状是瓶装，类别是其他，规格是100g，主要用途是铸模，保质期是36（月）