

电子体温计家庭温度计婴儿软头体温计排卵体温计出口外贸家用必备

产品名称	电子体温计家庭温度计婴儿软头体温计排卵体温计出口外贸家用必备
公司名称	义乌市博君电子商务商行
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 18.00 品牌:外贸款软头体温计 货号:软头体温计
公司地址	义乌市北苑街道丹溪五区22幢2号201室
联系电话	暂无

产品详情

产品介绍

产品名称：外贸软头体温计

产品包装：单个独立包装

产品重量：0.03

显示方式：电子液晶数字

测量精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 工作温度是： $0\text{--}55$ 工作电压是1.5v，电池寿命：约3年（以1天使用10分钟计算），可更换电池，确保长期使用。安全又实用的电子温度计，不再担心孩子使用传统温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果。而且能在很短的时间内准确测试出体温，为家居必备之用品。专为婴儿设计，探热时间约为1分钟，测量精度达0.1度，带声音提示，记忆功能。可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。【使用方法】使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒。按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号。显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示已处于待测状态。将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 $^{\circ}\text{C}$ 符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则 $^{\circ}\text{C}$ 符号停止闪烁，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值。

测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则若干分钟后自动关机。温度计使用时，打开电源后，先等20秒左右再测比较准。

温馨提示人体温度似身体健康状态的晴雨表，正常的体温一般在 $36^{\circ}\text{C}\sim 37.3^{\circ}\text{C}$ （以口腔温度为准）， $37.4^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$ 为低度发烧， $38.1^{\circ}\text{C}\sim 39^{\circ}\text{C}$ 为中度发烧， $39.1^{\circ}\text{C}\sim 41^{\circ}\text{C}$ 为高度发烧，大于 41°C 为超高度发烧；人的通常口探温度为 36.8°C ，腋探比口探约低 $0.3^{\circ}\text{C}\sim 0.5^{\circ}\text{C}$ ，肛探比口探约高 $0.3^{\circ}\text{C}\sim 0.6^{\circ}\text{C}$

友情提醒：测腋下请在原基础上+0.5度，早上人体体温计偏低0.5度。

本产品的建议零售价是¥ 18.00，品牌是外贸款软头体温计，货号是软头体温计，温度分辨率是0.1 ° C，产地是浙江，箱装数量是300，是否专利货源是否，温度测量范围是32~42 ° C，温度测量精度是±0.1 3 5.5 · 42 ° C