

# 英式医用氧气三通气源插座气体终端接头

产品名称	英式医用氧气三通气源插座气体终端接头
公司名称	绍兴上虞海玥医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	加工贸易形式:对外加工 加工能力:强 主要加工设备:数控仪表车
公司地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道新兴苑30幢109室
联系电话	13586880980

## 产品详情

产品名称:医用气体终端

### 一、用途及分类

医用气体终端（又称：快速接头、气源接头、气体插座、气座等）是一种不用任何工具，只需用双手或单手操作即能使管路连接或装卸，主要安装在医院的手术室、病房、急救室等场所的医用配气设备上（如病房治疗设备带、iuc手术室吊塔吊桥、治疗柱、配气箱、呼吸机、吸引器、麻醉机、气动医疗器具等）是医用中心供氧系统中的关键部件之一。我公司的医用气体终端主要包括以下五大类：

- 1、国产老航天
- 2、国产大头终端
- 3、英标气体终端
- 4、美标气体终端
- 5、德标气体终端
- 6、用户提供的实样或图纸加工定制其它类型的气体终端。

### 二、材质及性能参数

主体部分采有优质黄铜，表面电镀处理

- 1、氧气、笑气、氮气、二氧化碳终端应能承受0.8mpa气压不泄露；
- 2、空气终端应能承受1.0mpa气压不泄露；
- 3、吸引终端应能承受-0.075mpa气压不泄露；
- 4、废气终端应能承受-0.002mpa气压不泄露；

终端的连接方式有以下几种：铜球帽焊接、不锈钢球帽连接、铜卡套连接、管套连接、铜管焊接（一般选用 8或 10的管）、气管连接（气管主要安装在手术室吊塔上）。

### 三、使用及操作规程

- 1、出气接口部份有航天球形接口或卡套接口；
- 2、气体终端安装到设备带上以后要将防尘帽盖上；
- 3、不同的气体终端一定要使用配套的医用气体插头；
- 4、插头出现泄露现象时，应及时更换密封圈；

#### 四、注意事项

- 1、用于氧气的气体终端严禁接触油脂；
- 2、严禁擅自拆装；
- 3、严禁强制使用工具调整终端定位孔方向；

#### 五、售后服务承诺

在遵守储运、贮存和使用规则的前提下，自出厂之日起一年内，因质量问题，不用使用，本公司无偿为用户更换零件或产品。

本产品的加工贸易形式是对外加工，加工能力是强，主要加工设备是数控仪表车，加工设备数量是50，可否定制是可以，材质是铜或者不锈钢，产地是浙江