

密闭式接尿器（尿路造口）给患者以舒爽，还护理以方便

产品名称	密闭式接尿器（尿路造口） 给患者以舒爽，还护理以方便
公司名称	新乡市万泰医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:豫新食药监械（准）字2013第1660015号 产品注册证:豫新食药监械（准）字2013第1660015号 卫生许可证:豫新食药监械（准）字2013第1660015号
公司地址	浦东新区新运公司路东
联系电话	0373-8813199 13837336484

产品详情

产品简介

【结构组成】

本品由医用硅胶透气接尿斗、高弹性防硬抗老化导尿管和1000ml储尿袋、棉织宽腰围布件组合而成。

【型号规格和适用范围】男士专用性、女士专用型、萎缩性老年男士专用型，适用于临床各种长期卧床或尿失禁患者使用；尿路造口专用型适用于膀胱切除尿路改道患者体外装灌所排尿液。

【产品特点】

透气、防漏、卫生、舒爽、方便、长效。

【使用方法】

- a、男士、女士专用型：向袋内吹气使尿袋胀开以防粘连，如果尿管扭曲用热水烫开。将接尿斗口对准尿道口；再把围腰带拉紧在腰上；最后将接尿斗下方两根束带，向后分左右过大腿分别系在腰带的扣眼上。
- b、外生*器重要萎缩的男性使用“萎缩性老年男士专用”型，除上述事项外，把阴茎和睾丸全部放入接尿斗中即可。
- c、尿路造口专用型：1、使用前清洗干净造口周围皮肤。2、将制作好的接尿斗上口对准造口、然后把腰

带适度拉紧。3、把接尿斗和引流袋连接好即可使用。4、建议使用时从内裤内侧缝制一个大口袋、将尿袋装在里边，能减轻造口处的压力负担。

【注意事项】

a、男士专用、女士专用、萎缩性老年男士专用：1、导尿管低于尿斗，勿从腿上通过，尿带挂在床边，勿放在床上。2、防止尿斗及尿管扭曲。3、应经常清洗消毒，以免感染，为方便清洗接尿斗上设有清洗孔。4、腰围及束带松紧要适度。5、对接尿斗过敏者慎用。

b、尿路造口专用型：导尿管应低于尿斗。2、卧床使用可将尿带挂在床边，勿挂在床上。3、运动或活动时，根据需要可以将尿袋上的束腿带系在腿上使用。4、对接尿斗过敏者慎用。5、应经常清洗晾干。

本产品的药（械）准字是豫新食药监械（准）字2013第1660015号，产品注册证是豫新食药监械（准）字2013第1660015号，卫生许可证是豫新食药监械（准）字2013第1660015号，备案证是豫新食药监械（准）字2013第1660015号，有效期是其他（月），一次性使用是否，容量是1（L）