

医用卡扣止血带 经脉止血带 便携止血带 急救止血带

产品名称	医用卡扣止血带 经脉止血带 便携止血带 急救止血带
公司名称	佛山市镁力塑塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂城平洲中区涌源村环村路工业区4号厂房侧3号商铺
联系电话	13590612190 13318322590

产品详情

本工厂大量生产止血带，价格有绝对的优势，如果大批量下订，价格可以另议，欢迎各位咨询订购！！！！

(一)、产品总体描述

止血带用来阻断人体静脉的血液以达到医学上的某种需求,通常被广泛的应用在医院采血的情况下。除此之外,止血带也是一种紧急救命的设备,在四肢出现大量出血或是毒蛇咬伤的情况下,利用止血带,可以有效降低出血或是避免有毒血液快速散布,进而达到急救的目的。在野外的登山客特别需要随身携带,以防万一。

多种颜色可选

(二)产品详细描述

- 1.本工厂选用弹力好，比较厚的带子，带子质量no.1.
- 2.把带子和自家生产的塑料件组合起来。
- 3.组装成功后，把一条止血带装进一个opp的透明胶袋，美观，大方。

4.50条止血带装1个白色的盒子，简洁，实用。

5.500条装一个纸箱，可根据客户的需要，在纸箱上标识止血带的颜色，example：red，blue，ect.

(二)使用方法

1.打开小包装，取出压脉带，轻压压脉带锁止阀上的筏扣，阀扣自动弹出，拉出约20-35cm长度的松紧带，视病人上手臂的粗细而定

2.再将阀扣插回锁止阀，这样就形成压脉带圆环。

3.将圆环套入病人手臂，拉紧松紧带。即可进行常规的输液。

4.松开止血带时请先缓慢松开再弹开止血带

(三)可以在带和卡扣上印刷图案，我工厂接受oem贴牌生产.

(四)现场生产

1.自家研发模具，制作模具

2.利用自家制作好的模具，再用自家的注塑机把塑料件生产出来.

3.最后组成现场