

怡成虹吸式10条 适用JPS-5/-6/-7

产品名称	怡成虹吸式10条 适用JPS-5/-6/-7
公司名称	安国市天胜医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:北京怡成 型号:jps5、6、7
公司地址	东方药城国泰路68号
联系电话	86 0312 3554199 13933290711

产品详情

【产品名称】	怡成虹吸式血糖试条
【规格】	虹吸式 10条
【产品介绍】	1、每盒10条、单个包装。附送10个针头、使用方便。2、怡成血糖测试试条在怡成品牌超越血糖测试仪中通用。适用于怡成jps-5、jps-6、jps-7、jpst-5血糖仪的血糖测试3、怡成吸血血糖试条只适用人体末端血。例如：指血、血等4、试条单个包装袋打开后,须在5分钟内完成测试，
【试纸优点】	1、20秒即可测得血糖值 2、用血微量，仅需0.5微升3、采用虹吸进样方式，比滴血进样方式更科学，更简便4、两端进血操作简单
【保存方法】	试条在5~35℃环境温度下干燥、密闭保存15个月。包装不严密，试条受潮会导致测试不准确请勿使用过期试纸
【生产企业】	北京怡成生物技术有限公司
【保质期】	15个月

仪器使用操作说明 1、安装针头（具体见采血笔介绍及使用方法） 2、清洁手指 注意：消毒时用酒精棉球由内向外动而影响消毒效果。 3、校正校正码 启动仪器开关，仪器显示“888”自检程序，之后在屏幕下方显示“校正” 仪器校正码是否和试条校正码一致，如果不同，在“校正”提示闪动6秒钟内，连续按动主按键进行调整，直到，调到相同校正码时停止按动，校正码自动记忆。 注意:如不小心错过所需校正码的位置，请继续按动，仪器校正、插入试条 当仪器屏幕显示“插入”字符时，打开试条包装取出试纸，将试纸电极一端插入仪器插口。 注意：方向，插入时不要用力过大，以免折弯试条，检查插入是否到位，以屏幕是否显示“进血”字符为准。 5、采血需采血的部位，按动弹钮使针头刺破皮肤。 6、加样 当仪器显示“进血”字符时，将血样靠住虹吸端口处（左、，此时由于试条的虹吸原理，血样被自动吸入试条反应区内。 注意:血样需一次性充满反应区，不能反复加血，

本产品的加工定制是否，品牌是北京怡成，型号是jps5、6、7