

病床厂家直销|君缘医疗(图)|可以翻身的病床

产品名称	病床厂家直销 君缘医疗(图) 可以翻身的病床
公司名称	衡水滨湖新区常福医疗器械厂
价格	面议
规格参数	药（械）准字:3912
公司地址	魏屯镇时庄村
联系电话	86-03188973598 18732896284

产品详情

护理床的使用方法：1、体位调整 握紧背框控制手柄用力摇动，驱动背框缓缓升起，升到需要的角度时松开背框控制手柄，同样握紧背框控制手柄反方向摇动则下降，腿框的升降由腿框摇柄控制，足框的升降由足框控制手把控制。可使病人获得从平卧到半卧、曲腿、平坐等体位姿势。2、解便装置的使用：顺时针转动解便摇柄便孔盖自动打开，同时便器载体自动送到病人臀下，病人可进行大小便或清洗下部，逆时针转动解便手柄便孔盖关闭与床面保持齐平，同时便盆自动送出，护理人员拿去清洗，清洗后将便放回便器载体以备下次使用。3、侧护栏的安装：将侧护栏与床架上的两个护栏孔对齐，用螺栓紧固即可。4 生活台板的安装使用：后将生活台板背面带有凹型的4个定位塑料件，扣入侧护栏顶部即可。衡水君缘医疗器械有限公司生产的电动护理床的核心在于电机部分，君缘护理床采用无噪音电机，10000次升降无故障测试，我们承诺，在护理床使用期间如出现电机损坏导致床体不能使用的情况，我们将提供终生免费换新服务，以旧电机直接免费更换一套价值900元的新电机！

本产品的药（械）准字是3912