

## 2014新款便携式Hygeia Speaker心律测试仪 智能蓝牙健康伴侣

产品名称	2014新款便携式Hygeia Speaker心律测试仪 智能蓝牙健康伴侣
公司名称	深圳市余安安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 1200.00 产品类别:心率计/心率表 品牌:OEM
公司地址	广东深圳市福田区振华路赛格广场
联系电话	86 755 88607639

### 产品详情

hygeia™speaker便携式智能蓝牙健康伴侣---

这也许是世界上第一款可以检测身体功能的便携式智能蓝牙音箱

工作过程简介:

如(图一)所示双手按手按住hygeia speaker中如(图二)所示位置的钛合金片，只需要2分钟时间采集双手上连续性的生物性号，通过蓝牙传递给手机上的处理中心，在手机的app处理中心集成了强大精确的算法，解析出各种生理参数。具有即时，精确，安全，环保，方便，耗时间短的特点。

产品基本特点：

hygeia speaker 是一款便携式带健康检测功能的有屏幕触控显示的智能性蓝牙音箱。

根据临床数据，由心血管疾病病导致的死亡已经占到全球疾病死亡率的四分之一；

心血管疾病的发生往往有一定的突然性，一项普遍被认同的观点指出，心血管病死亡的并不是多发于医院，而往往是发生在院外没有心血管医生监护的地方。

hygeia speaker 集成强大的心电检测功能，能够随时检测出人体与生命特征紧密相关的参数，如：心率

，心跳加速，放松度，心脏年龄，心电的rrr间隔，心脏健康度，呼吸速率，心脏病风险意识等。每一项检测项目都有很强的指导意义，强大的算法及精准的测量可以为我们的身体健康提供及时准确的预警。有效引导我们提高生活的质量及对生命的敬畏与尊重。

hygeia speaker有效解决了普通人群需要去医院预约，排队的烦恼，在家即可做检测。同时在软件的设计上充分保护了个人隐私，别人不可能未经你的授权就可以看到你的生理参数。

深圳余安安贸易有限公司不对hygeia speaker作出任何关于医疗方面的承诺，也不对本产品测出的任何数据付法律上的责任。但是，如果在安静端坐，平稳呼吸的状态下经过多次测量，软件解析出的各项参数都处在非健康区，还是建议你花一点时间去医院去体检一下，毕竟生命高于一切。

产品结构：

外箱尺寸carton size: 40x30x21.6cm数量 quantity: 50 pcs/carton箱毛重 gross weight: 8 kg

hygeia speaker 具有如下功能：

- I 专业的蓝牙立体声语音传输；
- I 强大的心电检测功能，随时随地关注自己的身体状况；
- I 蓝牙免提通话；
- I 蓝牙音乐播放；
- I mp3音乐播放；
- I 录音功能；
- I tf卡热拔插；
- I 闹钟唤醒；
- I 耳机立体声音频输出；
- I 触控lcd显示；
- I 时间显示；
- I usb充电及传文件到tf卡；
- I 支持fm；
- I 超级便携，方便随身挂带，绝对是户外运动的随身不二选择；

I 万年历功能。

hygeia

speaker 适应范围：

I 卫生保健中心/临床心电检测和分析

I hrv/心率变异监控

I 身体心电方面有异常者的移动心电监测

I 便携式心率监测

I 10岁以上到老年人都适合的常规使用；

I 中老年人长期护理

I 潜在的不规则的心律检测

I 运动和训练运动员，瑜伽练习者训练用的心率指导和报警设备，当作

I 户外活动爱好者和娱乐用的心率检测器

I 车载蓝牙免提使用

I 对普通的娱乐功能有需求的

电池安全：

hygeia speaker内置容量高达1000ma以上的聚合物锂电池，绝对的环保，安全。能提供高达6小时以上的续航力及三周以上的待机时间。

心率

这个整型值记录了当前的用户的心率，以每分钟的跳动为单位(bpm)。与许多其他设备常见的心率报告不同，该值是根据每个用户实际心跳的r-peak（波峰）间隔时间精确实时计算的。这将得到一个非常精确并连续记录的随每个用户的实际的心跳而变化的心率值。

心跳加速

一个潜在的有用的心率指标就是加速率。正加速度值表示用户在一个特定的时间段内（如超过10秒）由一定数量的bpm得知心脏速率加快，而负加速度值表示用户的心脏速率在给定时间内一定数量的bpm减

慢了。当开始运动,或在运动过后,这种加速度量可以作为一个人分别在参加运动时心跳的加快和运动后心跳多快恢复正常的指标。

## 健康心脏水平

给定一个人的年龄,性别,和当前的静息心率,可以大致得到该人目前的健康心脏值,并能标记为“欠佳”,“低于平均水平”,“一般”,“高于平均水平”,“好”,“优秀”或“运动员”

## 呼吸速率

呼吸速率算法报告过去一分钟内的呼吸次数(次/分钟)。用户应静止坐姿,匀速缓慢或正常呼吸。算法在均匀呼吸情况下准确度最高。需要1分钟连续心电数据。算法结果介于5~30次/分钟之间。

呼吸率计算可以用于帮助减压放松及降低血压的锻炼。

## 放松度

放松度数值可以基于用户的心率可变性(hrv)特征,提示用户其心跳是否属于放松,或者兴奋,压力,疲劳。取值范围从1到100。高放松值趋向于表示一种放松的状态,而低放松值则趋向于表示兴奋,压力,或疲劳。

## 呼吸率

呼吸率数据值记录了用户大概每分钟的呼吸率。它是根据用户的ecg/ekg和心率变异性(hrv)特征计算的。

## 心脏病风险意识

心脏风险意识数值的目的是为了提提高用户的健康意识,比如发现hrv非常低时。低hrv已被证实会增加心脏病发作的风险和死亡率。

## 心脏年龄

心脏年龄数值表示了目标心脏的相对年龄,该值是根据他们的心率变异性(hrv)与普遍人群特征对比得出的。低hrv会增加死亡风险,也代表可能高于该用户的生理年龄的心脏年龄(如一个35岁用户的hrv特征表明其心脏是45岁)。该计算将考虑用户的生理年龄。要用这个数据建议目标对象生理年龄至少10岁。

## 心电的rr间隔

一般人心跳並非以一個固定的速度在跳動,激烈運動時,心跳可增至三倍;若仔細測量便發現每次心跳與心跳的間隔均有幾十毫秒以內的微小差異,即使在休息的狀態下,也會有相當程度的差異,此種差異稱之為心律變動性。心律變動可利用心電圖進行分析,於心電圖上,r波是較為顯著的波形容容易被偵測,r間距代表心臟的速率,故最常以rr間距來代表心跳間期

产品实拍图片：

联系方式：0755-88607639

旺旺：余安安1688

qq：2912768521

手机：13692270864 15914156112 余先生

发货时间：上午付款的货物一般都是当日下午统一安排发货，下午付款的货物需隔日下午发，周六下午的货物需下周一发。正常发货时间：周一至周六，周日休息。物流：顺丰，申通，圆通，中通，圆通，韵达，天天等，也可根据客户的需求选择。

## 产品质量

我们是工厂直接批发 保质保量 价廉物美

我们没有中间商 最大保护客户利益 您还有什么顾虑的呢

您有什么疑问我们给您第一时间解决

您要的产品我们可以第一时间发出

我们也可以一件代发 我们不问客户大小 我们尽量满足你的要求

温馨提示：我们每日都会有新款产品上架，但由于工作繁忙，未能及时更新上架，如有需要但未能在网站上查询到的产品，请直接与我们联系，我们会竭尽全力为您省时，省力，努力帮您做到一站式采购！我公司专业生产及销售苹果，三星等，手机保护套及周边配件，网站上所有产品。我们绝对会保质，保量，将同比最优的价格，最好的质量的产品提供给客户！我们承诺：如是我们产品本身的质量问题，我们将无条件为客户提供退，换货服务！

本产品的建议零售价是¥1200.00，产品类别是心率计/心率表，品牌是OEM，型号是HygeiaSpeakerH-7，材质是ABS，产地是中国深圳，加印LOGO是可以，加工定制是是，是否带音箱功能是世界上第一款可以检测身体功能的便携式智能蓝牙音箱