

加厚钢管牵引椅 牵引器 厂家直销治疗颈椎牵引椅 质量可靠

产品名称	加厚钢管牵引椅 牵引器 厂家直销治疗颈椎牵引椅 质量可靠
公司名称	衡水滨湖新区旭东医疗器械厂
价格	89.00/件
规格参数	产品类别：保健护颈:品牌：东升 材质：金属:是否自发热：否 货号：08:箱装数量：1
公司地址	衡水滨湖新区魏屯镇贺村
联系电话	13903181193

产品详情

椅子骨架用高频中臂焊管焊接成型白色烤漆。

- 2、椅子靠背立体与椅坐面椅与前腿用螺栓连接，可以拆开。方便运输
- 3、牵引杠用优质电镀管做成与下部分为两体。
- 4、手轮通过钢丝牵引绳、牵引计数器，可达到牵引所需力量。
- 5、钢丝牵引绳通过处均有滑轮，方便灵活。

安装顺序及方法：

- 1、将靠背腿、坐面与椅子前腿用螺丝栓相连接。
- 2、安装腿与腿之间支撑杆拧紧螺丝。
- 3、安装电镀牵引杆连接在后背立杆位置上用活节连接。
- 4、将钢丝牵引绳通过牵引杆孔穿入通过上滑轮引出，再穿入坐面下的槽轮孔。
- 5、将牵引计数器（弹簧秤）吊在上滑轮部的吊钩上。
- 6、将两手轮分别装入两端的轴头上拧紧钉丝。

使用方法：

- 1、使用前应确认各部位连接是否牢固、转动灵活。
- 2、使用时配合颈椎牵引带，挂在牵引计数器上，转动手轮。牵引力大小以使用者感觉适宜为好。
- 3、牵引结束、扳动制动抓即可解除牵引。
- 4、牵引时间一般每次30—50分钟、每天两次。10—15天为一疗程，或遵医嘱。

注意事项：

- 1、使用前请仔细检查安装连接是否牢固，以免伤及患者。
- 2、重症患者与高龄患者应在专人陪护协助下牵引。
- 3、如患有其它疾病是否适合牵引治疗请遵医嘱。

禁忌：

- 1、较重心肺疾病及脑血管疾病患者。
- 2、出血性倾向、恶性肿瘤患者。
- 3、被牵引区皮损、皮疹者。以上疾病患者禁止使用

技术参数：

总高度：1700mm 牵引调节范围：0—400mm

椅子高：850mm 最大牵引力：50kg椅面高：400mm

使用方法：1、使用前应确认各部位连接是否牢固、转动灵活。2、使用时配合颈椎牵引带，挂在牵引计数器上，转动手轮。牵引力大小以使用者感觉适宜为好。3、牵引结束、扳动制动抓即可解除牵引。4、牵引时间一般每次30—50分钟、每天两次。10—15天为一疗程，或遵医嘱

适用于颈椎患者的牵引，此产品采用优质钢材制成，牵引力大小由本人操纵，直到感觉舒适为止，适合家庭使用。主要适用于颈、腰椎病患者的牵引，牵引床由固定架、床腿、牵引组件（手轮、丝杠）、固定床面、活动床面组成，安装简单、坚固耐用，适合各级医院专科病房、专科诊所及家庭使用，牵引力大小由本人操纵，直到感觉舒适为止，使用简单、方便。

结构特点：

- 1、椅子骨架用高频中臂焊管焊接成型白色烤漆。（带测力计）
- 2、椅子靠背立体与椅坐面椅与前腿用螺栓连接，可以拆开。方便运输。

3、牵引杠用优质电镀管做成与下部分为两体。

4、手轮通过钢丝牵引绳、牵引计数器，可达到牵引所需力量。

5、钢丝牵引绳通过处均有滑轮，方便灵活

安装顺序及方法：

1、将靠背腿、坐面与椅子前腿用螺丝栓相连接。

2、安装腿与腿之间支撑杆拧紧螺丝。

3、安装电镀牵引杆连接在后背立杆位置上用活节连接。

4、将钢丝牵引绳通过牵引杆孔穿入通过上滑轮引出，再穿入坐面下的槽轮孔。

5、将牵引计数器（弹簧秤）吊在上滑轮部的吊钩上。

6、将两手轮分别装入两端的轴头上拧紧钉丝。

不同于小牵引椅的区别：软座面 软靠背 有扶手 横杆长度可调
操作简单，牵引舒服，使用方便。此款牵引椅是模具焊接打眼，螺丝可调，方便安装。

请切勿自行扩孔改制！发货前掌柜还要检查，调试一遍，直至每个细节，并用气泡膜包装重点部位。

本产品的产品类别：保健护颈是品牌：东升，材质：金属是是否自发热：否，货号：08是箱装数量：1，
产地：河北是加印LOGO：可以，加工定制：否