

肩部固定肱骨外展矫形器外展支具肩外展支架肩护托肩外展支具

产品名称	肩部固定肱骨外展矫形器外展支具肩外展支架肩护托肩外展支具
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:保健护肩 规格:均码 材质:肩外展支具
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

此产品名为肩外展矫形器又称为肩外展支架，是一种静态固定式肩矫形器。适用于肩关节手术后固定、肱骨骨折合并桡神经损伤、三角肌麻痹、棘上肌腱断裂、肩关节部位骨折、脱位整复后、臂丛神经麻痹或拉伤，也用急性肩周炎、肩关节化脓性关节炎、肩关节结核等。其特点是将肩关节固定在外展、前屈、内旋和肘关节屈曲、腕关节功能位；并在患者站立或卧床时，可使患肢处于抬高的位置，以利于消肿、消炎、止痛。

适应症：适用于肩关节术后固定、脱位整复后固定，肱骨骨折合并桡神经损伤、三角肌麻痹、冈（棘）上肌腱断裂、肩关节部位骨折、臂丛神经麻痹或拉伤，以及急性肩周炎、肩关节化脓性关节炎、肩关节结核等症保守治疗时的功能位固定。

商品特点：本品可以根据临床需要通过调节螺旋杆调节，使肩关节达到更为理想的外展角度。左右可以互换、通用，肩关节前曲、后伸角度可调，肘关节屈曲角度可调，腕关节功能位伸缩可调。

规格：均码、左右通用

独特设计造型美观，质量轻 功能稳定，穿戴便捷，可调自如 安全可靠。

性能：可根据医师需求调整肩关节屈曲，外展角度。、使肩关节保持在70°-90°。使肘关节屈曲45°-90°。使腕关节及掌指关节保持功能位，并使其免荷上肢长度可以进行微调

装配需知：

- 1.应在医师指导下，按患者身高适当调节腋下支条的长度，然后束牢胸廓带、髂嵴带和肩背带，以保证矫形器良好的支撑和免荷。
- 2.按患者的臂长调节矫形器上臂支条和前臂支条的长度，使肘关节和腕关节处于正确位置，然后扎好上臂固定带和前臂固定带。
- 3.通过调节腋下斜拉支杆的长度或肩外展内收调节盘，确定肩外展的角度；通过调节肘关节调节盘确定肘屈曲角度。
- 4.在患者站立或卧床时，可使患肢处于抬高的位置，以利于消肿、消炎、止痛

洗涤说明:建议您在30 以下的水温中以手洗方式清洗所以软性矫形器产品。清洗带支条的产品前，请将支条从开口的支条套中取出。温和皂水洗涤，阴凉处风干。