

塑胶容器 方形利器盒8L 卧式医用器盒 厂家常年

产品名称	塑胶容器 方形利器盒8L 卧式医用器盒 厂家常年
公司名称	上海昊超实业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚丙烯塑料 款式:翻盖垃圾桶 容量:8L
公司地址	上海 上海市普陀区 真南路1809弄69号21幢155室
联系电话	057988876718 13429044343

产品详情

产品展示：

产品说明：

产品材质：

采用全新聚丙烯塑料（pp），不含pvc，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧、封闭后无法以在不破坏的情况下打开

产品特点：

任何形状的体积，以球形和圆形最为节省材料，因此圆形的设计具有良好的经济性，加上实用性能，是目前国内市场最为普及的利器盒，本公司的产品具有质好价优的特点。

产品使用方法：

- 1.安装利器盒：将盒体与盒盖对接用力下压安装成整体。
- 2.左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒，逆时针旋转为开启，顺时针旋转为闭合。
- 3.注射器针头的收集：将针头伸入水滴形孔中，在注射器乳头与针头的接口处卡住，轻轻向外下压针筒，注射器针头就自动掉入利器盒内。
- 4.输液器的利器部分收集：手握输液器的软管，将利器部分伸入顶盖的大开孔中，用剪刀剪即可，其锐器部分即掉入利器盒内。

5.刀片或者玻璃等锐器，以及抽输血用的注射器、输液器等带血的污染物品可直接放入顶部大开孔中。

6.当利器盒被盛满至容积的70%时，应封闭利器盒：顺时针旋转顶盖上的红色旋转盘，听到“咯”的声响后，在红色顶盖的翘起处用力掀一下，整个利器盒即被安全锁定。

1. 收集注射器、输液器、一次性使用物品的针头；
2. 收集医用小玻璃制品、各类刀片、头皮针、缝合针等锐器；
3. 收集带血的整副注射器、输血器等接触血液的医用器材；
4. 其他规定必须放入利器盒的医疗锐器等锐利危险品

利器盒为一次性使用，按国家要求，规定在24小时内必须由医疗废物处置单位回收，在48小时内彻底安全焚化。

产品采用新聚丙烯料，不含pvc，具有方便、安全、无毒，耐穿刺，不渗漏，易于高温焚烧。封闭后无法在不破坏的情况下打开。

公司介绍：

上海昊超实业有限公司是一家专业从事医疗废物处置过程中相关设备和包装容器的产销企业，产品有毁形机，利器盒，医疗废物垃圾桶、周转桶/箱、一次性医用塑料制品等系列产品，是目前国内最专业、品种最齐全的医疗废物包装容器产销企业。公司一贯致力于医疗废物包装新产品的开发及高科技新材料的应用，并以提供优质的医废包装产品和服务、倡导科学规范的医疗废物管理理念、交流有效的医废处置方法与经验为己任。秉承“质量立企，诚信至上”的经营理念，将以完美的品质、合理的价格、热情的服务去赢得广大客户的认可与赞誉。我们真诚欢迎国内外新老客户建立长期友好的合作关系，共谋发展。

本产品的材质是聚丙烯塑料，款式是翻盖垃圾桶，容量是8L