

新款3L方形利器盒 医疗废物方形利器盒 医用垃圾桶 3L

产品名称	新款3L方形利器盒 医疗废物方形利器盒 医用垃圾桶 3L
公司名称	宁波格沃塑业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PP 尺寸:3L 容量:3L
公司地址	宁波高新区科技大厦4楼411-72
联系电话	0574-88129661 15906748666

产品详情

利器盒/锐器盒特点:

- 1.按照《医疗废物管理条例》的规范要求组织生产，产品质量可靠，使用方便、安全。
- 2.产品采用高密度聚丙烯塑料制造，不含pvc成份，具有无毒、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏、易于焚烧等优点。
- 3.工作口设计合理、大小适中，能方便地分离注射器的针头，并使注射器内残液不易外溅，有较大操作空间，确保安全。
- 4.工作口平滑线型设计，对收集整副带血的注射器、输液器也相当便利，不产生卡滞现象。
- 5.利器盒完全封闭后不能被正常打开，是目前国内真正意义上唯一达到卫生部该要求的利器盒。
- 6.产品可供医院各科室选用，合理的容量设计，确保使用科室的利器产生量与利器盒容积相符，以此来达到使用的经济性。

产品使用方法：

- 1.安装利器盒：将盒体与盒盖对接用力下压安装成整体。
- 2.左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒，逆时针旋转为开启，顺时针旋转为闭合。

3.注射器针头的收集：将针头伸入水滴形孔中，在注射器乳头与针头的接口处卡住，轻轻向外下压针筒，注射器针头就自动掉入利器盒内。

4.输液器的利器部分收集：手握输液器的软管，将利器部分伸入顶盖的大开孔中，用剪刀剪即可，其锐器部分即掉入利器盒内。

5.刀片或者玻璃等锐器，以及抽输血用的注射器、输液器等带血的污染物品可直接放入顶部大开孔中。

6.当利器盒被盛满至容积的70%时，应封闭利器盒：顺时针旋转顶盖上的红色旋转盘，听到“咯”的声响后，在红色顶盖的翘起处用力掀一下，整个利器盒即被安全锁定。

本产品的材质是PP，尺寸是3L，容量是3L