

医用一次性阴道冲洗器 小苏打清洗器 女性日常阴道清洁健康护理

产品名称	医用一次性阴道冲洗器 小苏打清洗器 女性日常阴道清洁健康护理
公司名称	上海缙卜嗲电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永康洁 材质:医用聚乙烯专用料 规格:200ml
公司地址	上海市松江区松汇中路326号
联系电话	18117200716 13062611751

产品详情

女性一次性阴道冲洗器 200ml ，用质量说话！

客户评价最好的一款冲洗器，绝非两三毛的那种地摊货可比！

最新生产日期

【产品性能结构及组成】

本产是以医用聚乙烯专用料为原材料制成,由冲洗头与贮液罐两部分组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌独立包装，无菌有效期为2年。

【适用范围】供医疗单位及女性阴道冲洗用。

配合本店的冲洗阴道用小苏打粉，可调节阴道酸碱度，

阴道冲洗器主要由波纹囊、冲洗头等组成。

它具有使用方便、安全、舒适，无污染及交叉感染等优点。

最大装量为200ml；波纹囊外径为5cm左右；洗涤器总长为18cm左右

同房后可以有效的清洁阴道可以减少受孕机会

【使用说明】

将阴道洗涤器的小包装拆除(拆除前应确认小包装无破损或漏气现象),将洗涤器的波纹囊口朝上放置在合适的位置,装入洗涤液,将波纹囊与冲洗头间的螺纹拧紧,使身体呈蹲姿,将冲洗头插入阴道至洗涤部位,挤压波纹囊使洗涤液冲洗阴道,冲洗完毕将冲洗头取出即可。

女用医用200ml一次性冲洗器,独立包装,清洁用品医用一次性使用阴道冲洗器,此价格是单个产品的价格。

使用说明:1 材料及组成:本产品由医用高分子材料制成,由冲洗头与冲洗瓶两部分组成。2

适用范围:本产品适用于阴道冲洗。3 使用方法:(1)将配好浓度的药液加入冲洗器,旋上冲洗头。(2)冲洗时,人仰或卧或蹲或坐,然后将冲洗头插入阴道,压缩瓶体药液即入阴道,取出即可。(3)重症者,阴道粘膜已结上伪膜,先用温开水加入冲洗器冲洗,将伪膜冲洗掉后,再用所需浓度的药液冲洗。4 注意事项:(1)本品为一次性使用。(2)该产品已由环氧乙烷灭菌,自灭菌合格之日起有效期为2年,产品已过有效期禁止使用。

(2)冲洗时,人仰或卧或蹲或坐,然后将冲洗头插入阴道,压缩瓶体药液即入阴道,取出即可。(3)重症者,阴道粘膜已结上伪膜,先用温开水加入冲洗器冲洗,将伪膜冲洗掉后,再用所需浓度的药液冲洗。4 注意事项:(1)本品为一次性使用。(2)该产品已由环氧乙烷灭菌,自灭菌合格之日起有效期为2年,产品已过有效期禁止使用。

本产品的品牌是永康洁,材质是医用聚乙烯专用料,规格是200ml,功能及用途是女性阴道清洁