

供应江西安贝手术显微镜保护套（带镜头）

产品名称	供应江西安贝手术显微镜保护套（带镜头）
公司名称	江西安贝医用制品有限公司
价格	200.00/个
规格参数	灭菌方式:环氧乙烷 型号:显微镜套 保质期:3年
公司地址	江西省南昌市青山湖区湖坊工贸城一期B5二楼
联系电话	020-36536840 013320114549

产品详情

手术显微镜保护套操作流程

- 1、取下显微镜保护套、镜头盖。
- 2、放松底座的刹车装置，收拢各节横臂，旋紧制动手轮，推至手术床边。
- 3、插上电源插座，接通电源，再开显微镜开关，检查功能是否正常，灯亮即可。
- 4、用无菌透明保护套把显微镜的镜头及前臂包好，再将保护套上镜头套在物镜上，尽量套紧，防止光源给镜片造成反光点。再把保护镜头两边松紧带找寻任向上的两点位挂上。
- 5、把要使用的主目镜及副目镜套好，撕开不干胶固定好位子。把另一边不用的收起。
- 6、用镜套上带的两个腰条把机身收紧，撕开不干胶固定好。
- 7、根据手术部位安放显微镜，满意后将底座的刹车刹牢并将各制动轮旋紧。
- 8、手术开始，协助术者调节镜头至功能位，只需扭动横臂上的黑色钮，光源的调节应从最小的亮度开始，调至合适；根据术者的瞳距和眼睛的屈光度进行调节，再调物镜焦距达最大清晰度。
- 9、手术结束，巡回护士先关显微镜开关，最后撤离电源，扣上镜头盖，套上显微镜保护套，整理归位。

注意事项：

- 1、在手术过程中，如手术器械碰到保护套镜头的镜片，不要去擦拭镜片，防止影响镜片的透明度。
- 2、显微镜应防止震动和撞击，应固定手术间，避免反复移动。套显微镜保护套时必须2人同步操作，按

无菌物品操作手册执行。

3、使用完毕，透镜表面定期用脱脂棉蘸无水酒精擦拭，保持干净。用显微镜保护套套住显微镜，保持光学系统的清洁。

本产品为一次性医用产品，其主要用于需要无菌隔离保护的医疗器械及医疗用品的防护。主要材质为进口聚乙烯薄膜。该产品系无菌包装，术前将其直接套在导线或仪器上，可充分保证术部无菌环境。术后一次性清除，具有方便、清洁减少了医务人员的工作强度的优点，有效节约了仪器维护及导线更换的开支。无菌保护套是由复合纸塑袋包装并密封的产品，经环氧乙烷灭菌处理，并经各项性能检测合格后，供应给医疗单位或个人使用。灭菌后无菌保护套后作为无菌产品，只限于一次使用，用后应予以销毁。江西安贝手术显微镜保护套是莱卡、蔡司、目乐都可通用的，其规格有250×120,300×120，200×120等。