

高质速溶消毒片 泡腾片替代84消毒液消毒剂去味剂 杀菌去污消毒

产品名称	高质速溶消毒片 泡腾片替代84消毒液消毒剂去味剂 杀菌去污消毒
公司名称	嘉兴莫恩克贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:3232 品牌:康博 有效物质含量:45(%)
公司地址	北京 北京市海淀区 锦绣大地
联系电话	01053691799 18657692587

产品详情

【主要有效成分及其含量】 主要成分二氯异氰尿酸钠，有效氯含量为45%+/-5%。【杀灭微生物类别】可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见菌和细菌芽孢。【使用范围】适用于环境表面和物品的消毒。

本品是很好的消毒产品，可以对医疗器械，桌椅台面、地面、厕所、便盆、痰盂、衣被、毛巾等消毒，对餐具、茶具、炊事器具等有良好的消毒去垢作用，也适用于传染病人家庭器具消毒，游泳池水等物体表面及公共环境消毒。【使用方法】

消毒对象	使用浓度（有效氯mg/l）	配制方法（2l水加入量）	消毒方式及作用时间
医院严重污染物品及环境	2000	8片	浸泡、喷洒消毒60分钟
使用后一次性医疗用品	2000	8片	浸泡消毒60分钟
疫区环境及物品表面	2000	8片	浸泡、喷洒消毒60分钟
医院一般污染物品及环境	500	2片	浸泡、喷、擦拭洒消毒30分钟
食品、饮水、制药等制造行业环境及一般物品	500	2片	浸泡、喷、擦拭洒消毒30分钟
卫生用具	500	2片	浸泡、喷、擦拭洒消毒30分钟
公共场所物品及环境	250	1片	浸泡、喷、擦拭洒消毒30分钟
家用物品衣被织物及环境	250	1片	浸泡、喷、擦拭洒消毒30分钟
幼托机构桌椅玩具及环境	250	1片	浸泡、喷、擦拭洒消毒30分钟

1克/片的用量参考表

- 【注意事项】** 1.本品为外用消毒剂，不得口服。如误服即喝适量牛奶中和稀释，并到医院就诊。
2.应用液现用现配。使用前请用测氯试纸测定有效氯浓度。
3.开启使用后剩余消毒剂应盖紧，避免受潮，冬季可用温水（20℃）配制。 4.本品对金属有腐蚀性，对织物有漂白作用，不宜用于丝绸、毛料、尼龙、易褪色织物及皮革制品，慎用于金属、漆器、油漆表面的消毒。 5.避光、密封，阴凉处保存。

本产品的型号是3232，品牌是康博，有效物质含量是45（%），含量是45（%）