

# 点滴输液提醒器报警器输液宝厂家批发 新品免重启自动恢复监控

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 点滴输液提醒器报警器输液宝厂家批发<br>新品免重启自动恢复监控                     |
| 公司名称 | 杭州逊玛特威科技有限公司   |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 工作时间:1000小时以上(超过1个月)<br>产品用途:特别适合住院输液病人<br>型号:201401 |
| 公司地址 | 杭州市江干区九盛路9号24幢1楼1041室                                |
| 联系电话 | 13606505577 18957180510                              |

## 产品详情

### 输液宝——输液提醒器特点

- 1、采用最先进的智能检测传感器，任何颜色液体均灵敏检测报警，无误报！
- 2、一键操作开启关闭，傻瓜式操作，老人也会用！
- 3、报警后换药不用重复关闭开启，自动重新进入监控。（不用手动关闭）
- 4、权威rohs产品安全性能认证，使用更放心！

输液宝—输液提醒器 2014年5月一经推出，既受到市场广泛好评，短短时间在淘宝销量排名第一，产品小巧美观方便，经济实惠耐用，公司坚持薄利多销，让更多病人能尽快享受它提供的实惠和方便。

一、产品概述1、适用性强：配有智能传感器的输液提醒器，能实时监测输液管内液体变化，适用于各种药水、血液、药水等，做到及时提醒；2、轻巧方便：重量只有12.5克（1/4两），大小和重量都相当于2个一元硬币，是目前市场上最最轻巧的，对输液管的影响做到最低；3、坚固耐用：内置锂电池，有效期5年，超低检测电流（现有市场同类最低，可以做对比），能轻松持续使用超过1年（24小时持续使用），如果是平时间断性的使用，则可用数年；4、灵敏准确：公司专有探测传感技术，经过上千人使用反馈，检测精准无误，100%满意！

输液宝能有效减轻病人家属的护理工作量，特别适用于住院初期病人、长期输液病人、老人儿童家庭，是不可多得的好帮手！

### 二、输液提醒器使用说明

1、开启：将输液管卡入输液提醒器右侧卡槽，按开关，输液提醒器会提示三声“滴”后进入检测状态，同时指示灯开始闪烁。

2、提醒：当输液管内无液体时，输液提醒器会间断发出“滴滴滴”的提示音，同时指示灯会加亮显示，提醒看护人员！

3、关闭：按输液提醒器开关，在得到提示音“滴”一声后，输液器停止工作。

### 三、输液报警器三大特点：

1、能适用于各种颜色、各种透明度的几乎所有输液药水、营养液及血液（本厂用近百种药水进行上万次模拟实验均未误报漏报警），对药水、营养液及血液没有任何接触和影响。

2、能适用于各种材质、各种壁厚、各种颜色、各种透明度，各种直径的输液管。

3、平均使用4000次（3年）才需要更换电池

个人使用至少可用2000天（5年），医院用1.5年，平均使用3年

### 四、注意事项

1、在检测状态时，请不要用手紧贴或握住检测器，不将监测器紧贴金属制品，以免影响检测发生误报。

2、内置大容量锂电池，在24小时开机的情况下持续使用超过一年。

3、如不能正常开启及工作，电池已经没电，请及时更换产品。

### 医院使用实拍图

输液完毕就自动报警，这是病人、家属、看护梦寐以求的，有了“安心”输液报警器您再也不必时刻注视输液药量，再也不用潜意识的看了一次又一次还要强迫自己再看一次，尤其是晚上，病人、陪床人员非常省心，不用担心睡过头了。病人能彻底放松消除焦虑加快康复；家属、看护大大减轻精神负担、降低工作强度，能更好地护理病人。从此您可以安心睡觉、专心看书、放心玩手机、游戏。

尽管本产品在使用时，不接触管内液体，无任何影响，但本着对患者的负责，我们还是做了rohs产品安全检测，检测结果不含任何有毒物质，让用户100%放心！

大货请联系qq：94450461，电话：18957180510

本产品的工作时间是1000小时以上（超过1个月），产品用途是特别适合住院输液病人，型号是201401，品牌是快易,其他