

# 三角巾82型三角巾急救包医用急救包军户外必备保质期5年

产品名称	三角巾82型三角巾急救包医用急救包军户外必备 保质期5年
公司名称	广州市润铭医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:RM 型号:82
公司地址	广州市荔湾区招村北外约38号第6幢三楼东侧301
联系电话	18819811100

## 产品详情

功能型三角巾急救包采用新型陶瓷复合材料代替普通三角巾急救包的接触层材料，具有消肿、止痛和促进创伤愈合等作用。适用于头、胸、腹、四肢等处的伤口包扎和伤肢悬臂托起包扎。

使用方法:撕开外包装、包装纸，打开折叠的三角巾和敷料垫，按标签的标识先将敷料垫贴附于创面上，再用三角巾进行包扎固定。

本品可用于现场急救、医疗储备、户外应急、工矿企业储备、训练等多项用途

适用位置:本急救包适用于头、胸、腹、四肢等处的伤口包扎和伤肢悬臂托起包扎。  
对较大创面、固定夹板、手臂悬吊等。

急救方法：

1.普通头部包扎：先将三角巾底边折叠，把三角巾底边放于前额拉到脑后，相交后先打一半结，再绕至前额打结。

2.风帽式头部包扎：将三角巾顶角和底边中央各打一结成风帽状。顶角放于额前，底边结放在后脑勺下方，包住头部，两角往面部拉紧向外反折包绕下颌。

3.普通面部包扎：将三角巾顶角打一结，适当位置剪孔（眼、鼻处）。打结处放于头顶处，三角巾罩于面部，剪孔处正好露出眼、鼻。三角巾左右两角拉到颈后在前面打结。

4.普通胸部包扎：将三角巾顶角向上，贴于局部，如系左胸受伤，顶角放在右肩上，底边扯到背后在后面打结；再将左角拉到肩部与顶角打结。背部包扎与胸部包扎相同，唯位置相反，结打于胸部。

包装：纸箱包装，200个箱。包装箱尺寸：600\*330\* 250mm。毛重：14kg箱。

#### 注意事项：

1.一般家庭没有三角巾，但其在急救时用途较广，应配备。制作很简单，用一米见方的布，从对角线剪开即成。

2.三角巾除上述用法外，还可用于手、足部包扎，还可对脚挫伤进行包扎固定，对不便上绷带的伤口进行包扎和止血。

3.三角巾另一重要用途为悬吊手臂；对已用夹板的手臂起固定作用；还可对无夹板的伤肢起到夹板固定作用。

本产品的加工定制是是，品牌是RM，型号是82