

# 江西安贝医用手术宫腔镜套

产品名称	江西安贝医用手术宫腔镜套
公司名称	江西安贝医用制品有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:江西安贝 型号:宫腔镜套 有效期:三年
公司地址	江西省南昌市青山湖区湖坊工贸城一期B5二楼
联系电话	020-36536840 013320114549

## 产品详情

### 无菌技术灭菌保护套

随着外科手术的迅速发展，新型手术仪器设备推广应用，而一些仪器设备需连接相应的导线后方可使用。如何快速、有效的将导线套上灭菌保护套，且与灭菌的器械相连，以保证手术顺利开展，成为手术室器械准备的重要环节之一。传统的方法是在套入之以双手大拇指及手腕用力将紧贴的保护套松开，但分开后双手都感到酸痛，而且操作效率低。在实践中摸索出一新的整理方法。此方法是以左手负重，右手协助将保护套分开，既简单易学，操作起来又非常省力。

现介绍如下。

(1) 操作方法 在整理无菌器械台时，由器械护士剪开内层无菌包装袋封口，取出150 cm × 14 cm 无菌保护套。将无菌包装袋套入左手指内，露出大拇指，以固定保护套。将无菌保护套开口端套入套有无菌包装袋的左手指内，四指外展张开与无菌包装袋横径相当。左手负重，右手协助快速将保护套套入左手内，直至尾端。套至尾端后，剪开尾端封口，以无触摸法将导线套上灭菌保护套，然后再将导线与灭菌器械相连。

(2) 优点 此操作方法的优点主要有：以左手负重代替了双手大拇指用力，避免了双手因用力过渡而产生酸痛感，即快又省力，从而有效的提高了手术操作效率。操作简单，所用时间短，容易学习掌握。取材方便，经济实惠，节省手术费用。此方法适用于各种规格型号的医用无菌保护套。

本产品为一次性医用产品，其主要用于需要无菌隔离保护的医疗器械及医疗用品的防护。主要材质为进口聚乙烯薄膜。该产品系无菌包装，术前将其直接套在导线或仪器上，可充分保证术部无菌环境。术后一次性清除，具有方便、清洁减少了医务人员的工作强度的优点，有效节约了仪器维护及导线更换的开支。无菌保护套是由复合纸塑袋包装并密封的产品，经环氧乙烷灭菌处理，并经各项性能检测合格后，供应给医疗单位或个人使用。灭菌后无菌保护套后作为无菌产品，只限于一次使用，用后应予以销毁。

手术宫腔镜套规格有150\*14,180\*20,200\*14等。